

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010

中継コード C I H-

【警告】

<適用対象(患者)>

異常が発見された場合は、ただちに患者が安全であるように、機器の動作を止めるなどの適切な措置を講じてください。

<使用方法>

医師または医師の指示を受けた者以外は、本製品を使用しないでください。

【禁忌・禁止】

- ・清掃にシンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- ・MRI でのご使用はできません。[誘導起電力による局所的な発熱で被検者が火傷を負うことがあります。]

【形状・構造及び原理等】

*構成品と種類



図は CIH-01CM

*種類

No.	型式	備考
1	CIH-01CM	薄型コネクタタイプ、双極 2ch エクセローデ W 用、T 型電極用、 内携帯用
2	CIH-02CM	薄型コネクタタイプ、双極 3ch エクセローデ W 用、内携帯用
3	CIH-01CM0.3	薄型コネクタタイプ、双極 2ch エクセローデ W 用、T 型電極用、 内携帯用 ケーブル長 0.3m
4	CIH-01CM(EV)	薄型コネクタタイプ、双極 2ch エクセローデ W 用、T 型電極用、 内携帯用 外部 EV スイッチ付
5	CIH-03CM	薄型コネクタタイプ、 T 型電極専用、外携帯用
6	CIH-04CM	薄型コネクタタイプ、 T 型電極専用、外携帯用
7	CIH-05CFE	薄型コネクタタイプ、双極 2ch エクセローデ W 用、T 型電極用
8	CIH-06CM	ワンプッシュ型コネクタタイプ、 ホルター心電計双極 2ch イベント心電計双極 1ch 内携帯用
9	CIH-06CM(EV)	ワンプッシュ型コネクタタイプ、 ホルター心電計双極 2ch イベント心電計双極 1ch 内携帯用 外部 EV スイッチ付
10	CIH-06CM0.6	ワンプッシュ型コネクタタイプ、 ホルター心電計双極 2ch イベント心電計双極 1ch 外携帯用 ケーブル長 0.6m
11	CIH-07CFE0.4	ワンプッシュ型コネクタタイプ、 ホルター心電計双極 2ch エクセローデ W 用、エクセローデ T 用

【使用目的又は効果】

使用目的

- ・患者の心電図信号を心電計 (ECG) に伝達する装置。本製品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】


1. 被検者に取り付けられた電極を線が見えなくなるまで奥に挿入し、レバーを倒してロックする。(薄型コネクタタイプの場合)



- **電極ロック解除ボタンと電極接続部のつめが同じ面になるように「カチッ」という音がするまで差し込み、引っ張って抜けないことを確認する。(ワンプッシュ型コネクタタイプの場合)



- **2. 本製品のコネクタを機器本体のコネクタ部に接続する。機器本体のコネクタ部を図のようにレバーを回してロックする。
3. 心電図を記録する。

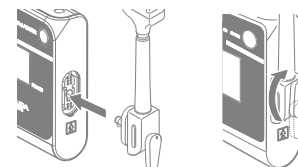

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本製品を電極や機器本体からはずす際は、コードを持たずにコネクタを持って引き抜いてください。[断線のおそれがあります。]
- ・指定の装置以外への接続は、行わないで下さい。[重大な事故の原因となることがあります。]

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないでください。

保管温度：-10～60℃

保管湿度：10～95% (ただし結露しないこと)

耐用期間

2 年[自己認証 (当社データ) による]

【保守・点検に係る事項】

- ・本製品使用後は、中性洗剤または 70% イソプロピルアルコールで清拭してください。また、コネクタ等からケーブルを引っ張るように清拭しないでください。[断線や破損のおそれがあります。]
- ・清拭後は乾燥していることを確認してご使用ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社

連絡先 (販売業者)

フクダ電子株式会社

〒113-8483 東京都文京区本郷 3-39-4

電話番号：03-3815-2121 (代)