

機械器具 21 内臓機能検査用器具  
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010

## 中継ボックスCI-172

### 【警告】

#### <適用対象(患者)>

異常が発見された場合は、ただちに患者が安全であるように、機器の動作を止めるなどの適切な措置を講じてください。

#### <使用方法>


医師または医師の指示を受けた者以外は、本製品を使用しないでください。

### 【禁忌・禁止】

- ・清掃にシンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- ・MRI でのご使用はできません。[誘導起電力による局所的な発熱で被検者が火傷を負うことがあります。]

### 【形状・構造及び原理等】

\*構成品と種類

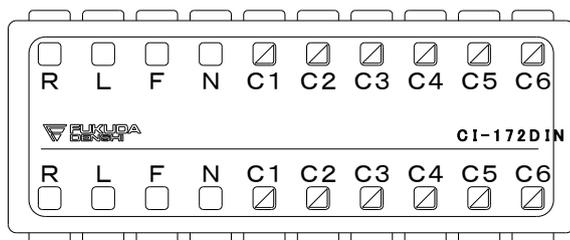

(図は CI-172DIN)

\*種類

No.	型式	備考
1	CI-172DIN	*カーボンローデ D I Nタイプ用
2	CI-172TJ	*カーボンローデ 3mmジャックタイプ用

### 【使用目的は効果】

#### 使用目的

- ・患者の心電図信号を心電計 (ECG) に伝達する装置。本製品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

### 【使用方法等】

1. 本製品に心電図用電極を接続する。
2. 本製品に誘導コードを接続する。
3. 接続した誘導コードのコネクタを機器本体のコネクタ部に接続し、心電図を記録する。

### 【使用上の注意】

#### <重要な基本的注意>

- ・本製品から電極やコードをはずす際は、コードを持たずにコネクタを持って引き抜いてください。[断線のおそれがあります。]
- ・指定の装置以外への接続は、行わないで下さい。[重大な事故の原因となることがあります。]

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法

- ・水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないでください。

使用温度: 10~40℃

使用湿度: 30~85%

#### 耐用期間

2年 [自己認証(当社データ)による]

### 【保守・点検に係る事項】

- ・本製品使用後は、中性洗剤または70%イソプロピルアルコールで清拭してください。[製品の劣化を促進し、破損の恐れがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん液等の消毒液は劣化を促進します。]
- ・清拭後は乾燥していることを確認してご使用ください。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社

連絡先 (販売業者)

フクダ電子株式会社

〒113-8483 東京都文京区本郷 3-39-4

電話番号: 03-3815-2121(代)