

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010

中継ボックス CI-173 シリーズ

【警告】

＜適用対象(患者)＞

異常が発見された場合は、ただちに患者が安全であるように、機器の動作を止めるなどの適切な措置を講じてください。

＜使用方法＞


医師または医師の指示を受けた者以外は、本製品を使用しないでください。

【禁忌・禁止】

- ・清掃にシンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- ・ケーブルを患者の首に巻きつけるように配置しないでください。[ケーブルが首に巻きつき、被検者の生命及び健康に影響を与える恐れがあります。]
- ・MRI でのご使用はできません。[誘導起電力による局所的な発熱で被検者が火傷を負うことがあります。]

【形状・構造及び原理等】

構成部品と種類

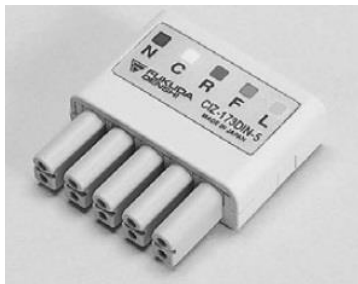

(写真は CIZ-173DIN-5)

種類

No.	型式	備考	接続電極
1	CIZ-173DIN-3	1 誘導（3 電極）	TEY-162DX タイプ
2	CIZ-173DIN-5	2 誘導（5 電極）	TEY-162DX タイプ
3	CIZ-173DIN-C	MCS-9000 胸部用	TEY-162DX タイプ

【使用目的・効能又は効果】

使用目的

- ・患者の心電図信号を心電計（ECG）に伝達する装置。本品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部又は四肢に取り付ける。

【使用方法等】

1. 被検者に電極を取り付けた後、本品を電極に接続する。
2. 本品のコネクタを機器本体のコネクタ部に接続し、心電図を記録する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・本品を電極や中継コードから外す際は、コードを持たずにコネクタを持って引き抜いて下さい。[断線や破損のおそれがあります。]

- ・指定の装置以外への接続は、行わないで下さい。[故障や重大な事故の原因となることがあります。]
- ・ケーブルを強くねじらないでください。ケーブルを巻いて束ねた状態から強く引っ張るとねじれの原因となります。[断線や破損のおそれがあります。]
- ・ケーブルの上にものを置いたり、踏まれたりしないようにしてください。[断線や破損のおそれがあります。]
- ・破損（キズ、はがれ、変形等）した製品は使用しないでください。[傷害を負ったり、物的損害の恐れがあります。]

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないでください。

使用温度： 10～40℃

使用湿度： 30～90%

耐用期間

2 年 [自己認証(当社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

- ・清掃はフクダ電子製医療機器清拭クロス（OAZ-10S または OAZ-10L）で拭いて下さい。もしくは、消毒用アルコール（エタノール、イソプロピルアルコール）をガーゼや脱脂綿等に含ませて固くしぼり、本品を拭いて下さい。
- ・拭いた後に医療機器清拭クロスの液状成分が残っている場合は乾いた柔らかい布でふき取ってください。[表面の樹脂を損傷させ、変色や傷、故障や劣化の原因となることがあります。]
- ・医療機器清拭クロスでコネクタ端子周囲は清拭しないでください。[故障の原因となることがあります。]
- ・化学ぞうきん、タワシ、金属タワシ、研磨剤、磨き粉、熱湯薬品（クレンザー、シンナー、トルエン、ベンジン、ベンゾール、住宅用／家具用合成洗剤）強酸性の薬剤、溶剤（揮発性、有機系）や油脂を含むクリーナー類、鋭利な工具等を使用しないでください。[表面の樹脂を損傷させ、変色や傷、故障や劣化の原因となることがあります。]
- ・清拭後は乾燥していることを確認してご使用ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社

連絡先（販売業者）

フクダ電子株式会社

〒113-8483 東京都文京区本郷 3-39-4

電話番号：03-3815-2121(代)