

機械器具 21 内臓機能検査用器具  
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010


## 電極コードYCEシリーズ

### 【禁忌・禁止】

- MRI でのご使用はできません。  
[誘導起電力による局所的な発熱で、被験者が火傷を負うことがあります。]

### 【形状・構造及び原理等】

構成品と種類

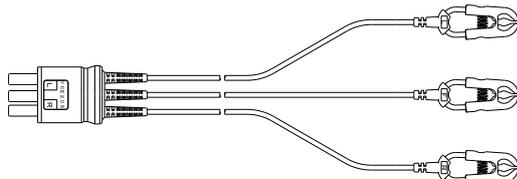

(図は YCE205)

\*\*種類

No.	品番	備考	包装
1	YCE205	クリップ式(赤・黄・緑)	1本入

### 【使用目的又は効果】

#### 使用目的

- 患者の心電図信号を心電計 (ECG) に伝達する装置。本品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

### 【使用方法等】

1. 被検者にディスプレイ電極を取り付けた後、本品を電極に接続する。
2. 本品のコネクタを機器本体のコネクタ部に接続し、心電図を記録する。

### 【使用上の注意】

#### <重要な基本的注意>

- 本品を電極や機器本体等からはずす際は、コードを持たずにコネクタを持ってはずすこと。[断線のおそれがあります。]
- 本品は、薬液や水に触れないようにし、濡れた状態では使用しないこと。[クリップ部はヒビテン、希コード等 消毒液が付着すると電気導電性を損ない、また乾燥固化することがありますが、これはクリップ部の樹脂が溶けているものではありません。]
- 指定の装置以外への接続は、行わないこと。
- 本品は防水仕様ではありません。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法

- 保管環境及び保管の注意  
水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないこと。

使用温度: 10~40℃

使用湿度: 30~85%

#### 耐用期間

1年 [自己認証(当社データ)による]

但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがあります。

### 【保守・点検に係る事項】

- 本品使用後は、水またはぬるま湯に湿らせたガーゼ、または酒精綿で清拭すること。
- シンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。  
コードを拭く際は、接続コネクタ等からコードを引っ張るように拭かず、コード部を握って拭くこと。[コード被覆の劣化を促進し、破損のおそれがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん液等の消毒液はコード被覆の劣化を促進します。]
- 清拭後は乾燥していることを確認して使用すること。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

\*\*製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社

TEL: 042-560-5661 FAX: 042-560-8934