

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010


Φ3プラグーΦ4ジャック 変換コード

【禁忌・禁止】

- ・清掃にシンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- ・MRI でのご使用はできません。[誘導起電力による局所的な発熱で被検者が火傷を負うことがあります。]

【形状・構造及び原理等】

*構成品と種類

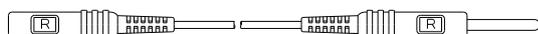

*種類

No.	品番	備考	包装
1	FCA-1210	12誘導用 (R、L、F、N、C1～C6)	10本/組

【使用目的又は効果】

使用目的

- ・患者の心電図信号を心電計 (ECG) に伝達する装置をいう。
本品はあるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

- ・本品のΦ4ジャック側に心電図入力コードピン径Φ4を差し込む。
- ・本品のΦ3プラグ側に心電計用電極を接続する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本品を電極や機器本体等からはずす際は、コードを持たずにコネクタを持ってはずして下さい。[断線のおそれがあります]□
- ・本品は、薬液や水に触れないようにし、濡れた状態では使用しないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないで下さい。

使用温度： 10～40℃

使用湿度： 30～90%

*耐用期間

1年 (自主基準) 但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがあります。

【保守・点検に係る事項】

- ・本品使用後は、水またはぬるま湯に湿らせたガーゼ、または酒精綿で清拭して下さい。
- *・本品は防水仕様ではありません。流水や水没させての洗浄は行わないでください。
- *・シンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないで下さい
コードを拭く際は、接続コネクタ等からコードを引っ張るように拭かず、コード部を握って拭いてください。[コード被覆の劣化を促進し、破損のおそれがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん液等の消毒液はコード被覆の劣化を促進します。]
- ・清拭後は乾燥していることを確認してご使用下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社

連絡先 (販売業者)

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

お問い合わせ先： サプライセンター

TEL 0120-187-855

FAX 042-582-6923