

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード
JMDN コード : 35562010

レッドダット モニタリング電極用リード線

【警告】

＜適用対象(患者)＞

患者に異常がないことを絶えず監視し、異常が発見された場合は、ただちに患者が安全であるように、機器の動作を止めるなどの適切な措置を講じること。

＜使用方法＞

医師または医師の指示を受けた者以外は、本製品を使用しないこと。


【禁忌・禁止】

1. MRI で使用しないこと。
[誘導起電力による局所的な発熱で、患者が熱傷を負う恐れがあるため。]
2. 除細動器に接続しないこと。
3. AC 電源には差し込まないこと。
[感電する恐れがあるため。]
4. 清掃にシンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないこと。
[破損する恐れがあるため。]


【形状・構造及び原理等】

本品の電極側接続部は、心電計用電極が取り付けられる形状であり、クリップ式、ワニ口式、DIN レセプタクル式、シュア・グリップ式等の形状がある。

本品の心電計への装置側接続端子は、使用する心電計に適した接続端子形状である。

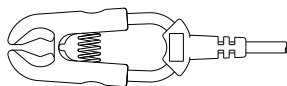


クリップ式

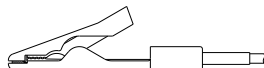

ワニ口式



DIN レセプタクル式

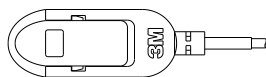

シュア・グリップ式

【使用目的又は効果】

患者の心電図信号を心電計 (ECG) に伝達する装置をいう。

【使用方法等】

1. 本品の装置側接続端子に対応する心電計に、装置側接続端子を接続する。
2. 本品の電極側接続部に対応した電極が準備されていることを確認する。
3. 通常、適切な位置に電極を貼付した後、本品の電極接続部と心電計用電極を接続する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 本品を心電計用電極や心電計から外す際は、必ず電極側接続部や装置側接続端子を持って引き抜くこと。
[断線の恐れがあるため。]
2. 指定の装置以外への接続は行わないこと。
[重大な事故の原因となることがあるため。]
3. 電気手術器具 (電気メス等) との併用時には、相互に影響がないように十分に配慮すること。
[重大な事故の原因となることがあるため。]

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・高温多湿になる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等を避けて保管すること。

＜使用期間＞

- ・有効使用年数 (自主基準)
有効期間 (耐用期間) : 1 年

但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがあります。

【保守・点検に係る事項】

1. 本品使用後は、中性洗剤または 70% 程度のイソプロピルアルコールで清拭すること。
2. 清拭後は乾燥していることを確認してから使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社

TEL (042) 560-5661 FAX (042) 560-8934

*連絡先 (販売業者)

**ソルベンタム合同会社

〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-29

TEL : 0570-000-470 (カスタマーコールセンター)