

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード
JMDN コード：35562010

タブ電極用リード線

【警告】

＜適用対象(患者)＞

患者に異常がないことを絶えず監視し、異常が発見された場合は、ただちに患者が安全であるように、機器の動作を止めるなどの適切な措置を講じること。

＜使用方法＞

医師または医師の指示を受けた者以外は、本製品を使用しないこと。


【禁忌・禁止】

1. MRI で使用しないこと。
[誘導起電力による局所的な発熱で、患者が熱傷を負う恐れがあるため。]
2. AC 電源には差し込まないこと。
[感電する恐れがあるため。]
3. 清掃にシンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないこと。
[破損する恐れがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

本品の電極側接続部は、心電計用電極が取り付けられる形状であり、ワニ口式の形状である。

本品の心電計への装置側接続端子は、使用する心電計に適した接続端子形状である。

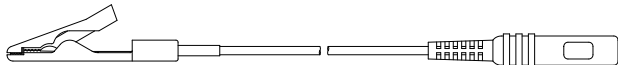

【仕様】

項 目	仕 様
導通抵抗	5 Ω 以下

【使用目的又は効果】

患者の心電図信号を心電計 (ECG) に伝達する装置をいう。本品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

1. 本品の装置側接続端子に対応する心電計に、装置側接続端子を接続する。
2. 本品の電極側接続部に対応する心電計用電極を装着し、コネクタを接続する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 本品を心電計用極や心電計から外す際は、断線する恐れがあるため、必ず電極側接続部や装置側接続端子を持って引き抜くこと。
[断線の恐れがあるため。]
2. 指定の装置以外への接続は行わないこと。
[重大な事故の原因となることがあるため。]

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・高温多湿になる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等を避けて保管すること。

＜使用期間＞

- ・有効使用年数 (自主基準)
有効期間 (耐用期間)：1 年
但し、これは推奨された環境で使用した場合で、使用状況により差異が生じることがあります。

【保守・点検に係る事項】

1. 本品使用後は、中性洗剤または70%程度のイソプロピルアルコールで清拭すること。
2. 清拭後は乾燥していることを確認してから使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社

TEL (042) 560-5661 FAX (042) 560-8934

連絡先 (販売業者)

株式会社スズケン

〒461-8701 名古屋市東区東片端町 8 番地

TEL：052-950-6325