


機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 一般的名称:心電計ケーブル及びリード 35562010

誘導コード KP シリーズ

【禁忌・禁止】

- ・MRI でのご使用はできません。[誘導起電力による局所的な発熱で被検者が火傷を負うことがあります。]

**【形状・構造及び原理等】

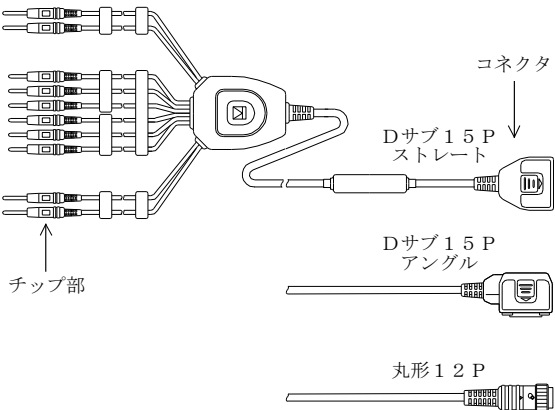

**KP-600D

分類

型名	デフ対策	コネクタ形状	接続可能心電計
KP-309	なし	Dサブ15P ストレート	α 1000
KP-309D	あり		
KP-310	なし	丸形12P	501B
KP-310D	あり		
KP-313	なし	Dサブ15P アングル	α 1000
KP-313D	あり		
KP-405※	なし	Dサブ15P ストレート	α 8000CX C620WCX
KP-405D※	あり		
KP-500	なし	Dサブ15P ストレート	C100 C110 C120 C300 C310 C550 C610 C610W C625 α 2000 シリーズ C330 C630 *C800
KP-500D	あり		
KP-500S	なし		
KP-505	なし		
KP-505D	あり		
KP-500L	なし	Dサブ15P アングル	α 1000
**KP-600D	あり	Dサブ15P ストレート	C340 C800

※KP-405、KP-405D は胸部誘導のチップ部が 2 本 (学童検診用)
KP-500S については KP-500 の四肢/胸部の本数、またはケーブル長が標準品と異なる仕様である。
KP-500L についてはコネクタ形状がアングルタイプとなり KP-500 の四肢/胸部の本数、またはケーブル長が標準品と異なる仕様である。

仕様

項目	仕様
導通抵抗	5 Ω 以下 (デフ対策品は 20 k Ω $\pm$ 1 k Ω 、但し N は 5 Ω 以下)
絶縁抵抗	DC1000V 100M Ω 以上

【使用目的又は効果】

- ・患者の心電図信号を心電計 (ECG) に伝達する装置です。本品はあるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付けます。

【使用方法等】

- ・本品のチップ部を電極に差し込みます。
- ・本品のコネクタを心電計の患者入力コネクタに接続します。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・指定の心電計以外への接続は、行わないでください。[重大な事故の原因となることがあります。]
 - ・本品を心電計から抜くとき、また電極を外すときは、コードを持たずにコネクタやチップ部を持って引き抜いてください。[断線の恐れがあります。]
- *・本品は防水仕様ではありません。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないでください。
使用温度 10 $\sim$ 40 $^{\circ}$ C
使用湿度 25 $\sim$ 95%

使用期間

耐用期間: 2 年 [自己認証 (当社データ) による]

【保守・点検に係る事項】

- ・使用後は、中性洗剤または 70% イソプロピルアルコールで清拭してください。
- *・シンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。
コードを拭く際は、接続コネクタ等からコードを引っ張るように拭かず、コード部を握って拭いてください。[コード被覆の劣化を促進し、破損のおそれがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん液等の消毒液はコード被覆の劣化を促進します。]
- ・拭いた後は乾燥していることを確認してご使用ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社

連絡先

フクダ エム・イー工業株式会社 千葉事業所
千葉県流山市南流山 6-26-8
電話番号 04-7158-9011 (代表)