

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010


誘導コード KP-328

【禁忌・禁止】

- ・MRI でのご使用はできません。
[誘導起電力による局所的な発熱で、被検者が火傷を負うことがあります。]

【形状・構造及び原理等】

*構成品と種類

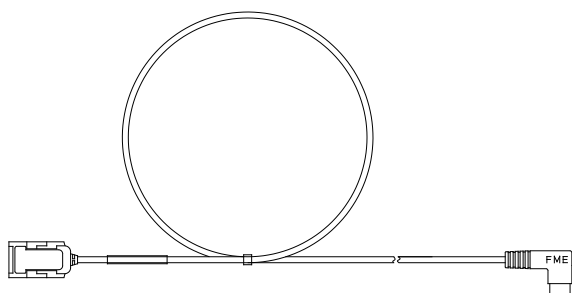

*種類

品 番	備 考
KP-328	QR2100


【使用目的又は効果】

使用目的

- ・患者の心電図信号を心電計（ECG）に伝達する装置。
- ・本品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

1. ディスポーザブル電極に本品を取り付ける。

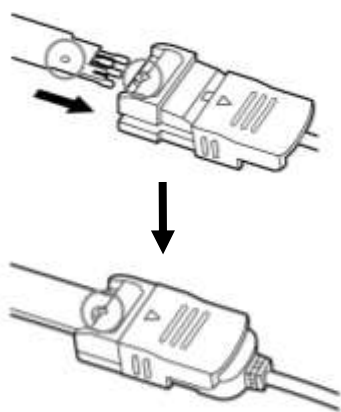

2. ディスポーザブル電極を人体の指定位置に貼り付ける。
3. 本品をホルター心電計に接続し、心電図を記録する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・本品を電極や機器本体等からはずす際は、コードを持たずにコネクタを持ってはずして下さい。[断線のおそれがあります]
- ・本品は、薬液や水に触れないようにし、濡れた状態では使用しないで下さい。
- ・指定の装置以外への接続は、行わないで下さい。
- *・本品の機器側コネクタは防水仕様ではありません。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないで下さい。

使用温度： 10～40℃

使用湿度： 30～85%

＜使用期間＞

- ・有効使用年数（自主基準）
有効期間（耐用期間）：1 年
但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがあります。

【保守・点検に係る事項】

- ・本品使用後は、水またはぬるま湯に湿らせたガーゼ、または酒精綿で清拭して下さい。
- *・シンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。
コードを拭く際は、接続コネクタ等からコードを引っ張るように拭かず、コード部を握って拭くこと。[コード被覆の劣化を促進し、破損のおそれがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん液等の消毒液はコード被覆の劣化を促進します。]
- ・清拭後は乾燥していることを確認してご使用下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社

TEL (042) 560-5661 FAX (042) 560-8934

連絡先

フクダ エム・イー工業株式会社 千葉事業所

千葉県流山市南流山 6-26-8

電話番号 04-7158-9011（代表）