

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010


心電図入力コード P C ー

【禁忌・禁止】

- ・MRI でのご使用はできません。
[誘導起電力による局所的な発熱で、被検者が火傷を負うことがあります。]

【形状・構造及び原理等】

**構成品と種類

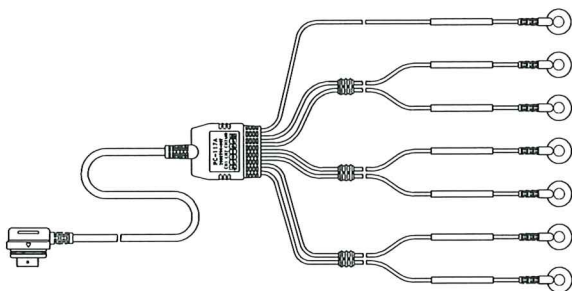

(図は PC-117A)

**種類

No.	品 番	備 考
1	PC-116A	2CH タイプ
2	PC-116G	2CH タイプ
3	PC-117A	3CH タイプ
4	PC-117G	3CH タイプ
5	PC-116SA	2CH タイプ
6	PC-117SA	3CH タイプ

【使用目的又は効果】

使用目的

- ・患者の心電図信号を心電計 (ECG) に伝達する装置。
- ・本品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

- 1.被検者にディスプレイ電極を取り付けた後、本品を電極に接続すること。
- 2.本品のコネクタを機器本体のコネクタ部に接続し、心電図を記録すること。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本品を電極や機器本体等からはずす際は、コードを持たずにコネクタを持ってはずすこと。[断線のおそれがあります]
- ・本品は、薬液や水に触れないようにし、濡れた状態では使用しないこと。
- ・指定の装置以外への接続は、行わないこと。

**・本品は防水仕様ではありません。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないこと。

使用温度: 10~40℃

使用湿度: 30~85%

有効期間・耐用期間

- ・有効使用年数 (自主基準)
有効期間 (耐用期間): 1 年
但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがあります。

【保守・点検に係る事項】

- ・本品使用後は、水またはぬるま湯に湿らせたガーゼ、または酒精綿で清拭すること。
- **・シンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。
コードを拭く際は、接続コネクタ等からコードを引っ張るように拭かず、コード部を握って拭くこと。[コード被覆の劣化を促進し、破損のおそれがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん液等の消毒液はコード被覆の劣化を促進します。]
- ・清拭後は乾燥していることを確認して使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社
TEL (042) 560-5661 FAX (042) 560-8934

発売元

*GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

お問い合わせ先: サプライセンター

TEL 0120-187-855

FAX 042-582-6923

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010


心電図入力コード PCー

【禁忌・禁止】

- ・MRI でのご使用はできません。
[誘導起電力による局所的な発熱で、被検者が火傷を負うことがあります。]

【形状・構造及び原理等】

**構成品と種類

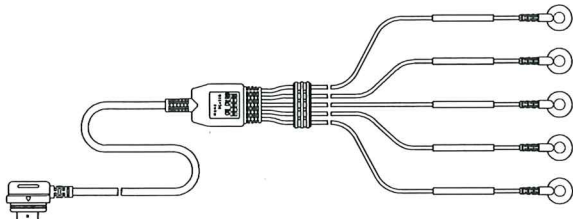

(図は PC-116)

**種類

No.	品番	備考
1	PC-115	2CH タイプ
2	PC-116	2CH タイプ
3	PC-116S	2CH タイプ
4	PC-117	3CH タイプ
5	PC-117S	3CH タイプ
6	PC-117H	3CH タイプ
7	PC-118 (5)	3CH タイプ

【使用目的又は効果】

使用目的

- ・患者の心電図信号を心電計 (ECG) に伝達する装置。
- ・本品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

- *1. 本品をディスプレイ電極に接続した後、被検者にディスプレイ電極を装着する。
2. 本品のコネクタを機器本体のコネクタ部に接続し、心電図を記録する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本品を電極や機器本体等からはずす際は、コードを持たずにコネクタを持ってはずして下さい。[断線のおそれがあります]
 - ・本品は、薬液や水に触れないようにし、濡れた状態では使用しないで下さい。
 - ・指定の装置以外への接続は、行わないで下さい。
- **・本品は防水仕様ではありません。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないで下さい。

使用温度: 10~45℃

使用湿度: 10~95%

有効期間・耐用期間

- ・有効使用年数 (自主基準)
有効期間 (耐用期間): 1 年
但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがあります。

【保守・点検に係る事項】

- ・本品使用後は、水またはぬるま湯に湿らせたガーゼ、または酒精綿で清拭して下さい。
- **・シンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。
コードを拭く際は、接続コネクタ等からコードを引っ張るように拭かず、コード部を握って拭くこと。[コード被覆の劣化を促進し、破損のおそれがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん液等の消毒液はコード被覆の劣化を促進します。]
- ・清拭後は乾燥していることを確認してご使用下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社
TEL (042) 560-5661 FAX (042) 560-8934

発売元

株式会社スズケン
愛知県名古屋市中区東片端町 8 番地
TEL (052) 950-6325 FAX (052) -962-7440


心電図入力コード P C ー

【禁忌・禁止】

- ・MRI でのご使用はできません。
[誘導起電力による局所的な発熱で、被検者が火傷を負うことがあります。]

【形状・構造及び原理等】

**構成品と種類

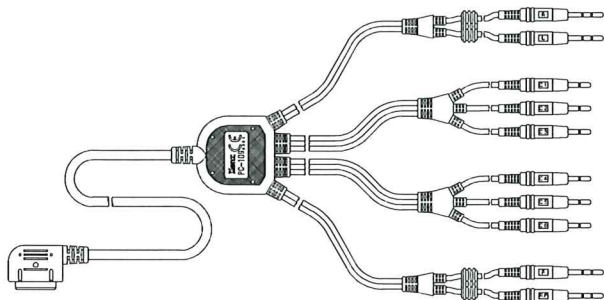

(図は PC-109)

**種類

品 番	備 考
PC-109	Φ 3 プラグタイプ
*PC-109 4MM	4 MM バナナタイプ
*PC-109 AAMI	Φ 3 プラグタイプ (海外用)

【使用目的又は効果】

使用目的

- ・患者の心電図信号を心電計 (ECG) に伝達する装置。
- ・本品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

1. 本品に四肢電極、及び胸部電極を接続する。
2. 本品のコネクタを機器本体のコネクタ部に接続する。
3. 四肢電極、及び胸部電極を被検者に取り付け、心電図を記録する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本品を電極や機器本体等からはずす際は、コードを持たずにコネクタを持ってはずして下さい。[断線のおそれがあります]
 - ・本品は、薬液や水に触れないようにし、濡れた状態では使用しないで下さい。
 - ・指定の装置以外への接続は、行わないで下さい。
- **・本品は防水仕様ではありません。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないで下さい。

使用温度: 10~40℃

使用湿度: 30~85%

有効期間・耐用期間

- ・有効使用年数 (自主基準)
有効期間 (耐用期間): 1 年
但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがあります。

【保守・点検に係る事項】

- ・本品使用後は、水またはぬるま湯に湿らせたガーゼ、または酒精綿で清拭して下さい。
- **・シンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。
コードを拭く際は、接続コネクタ等からコードを引っ張るように拭かず、コード部を握って拭くこと。[コード被覆の劣化を促進し、破損のおそれがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん液等の消毒液はコード被覆の劣化を促進します。]
- ・清拭後は乾燥していることを確認してご使用下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社
TEL (042) 560-5661 FAX (042) 560-8934

発売元

株式会社スズケン
愛知県名古屋市中区東片端町 8 番地
TEL (052) 950-6325 FAX (052) -962-7440


心電図入力コード P C ー

【禁忌・禁止】

- ・ MRI でのご使用はできません。
[誘導起電力による局所的な発熱で、被検者が火傷を負うことがあります。]

【形状・構造及び原理等】

**構成品と種類

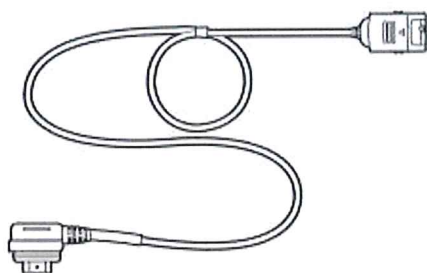

(図は PC-120)

**種類

品 番	備 考
PC-120	ロングタイプ
PC-120S	ショートタイプ
PC-121	ロングタイプ
PC-121S	ショートタイプ
PC-123	衣類内装着タイプ
PC-123S	ショートタイプ


【使用目的又は効果】

使用目的

- ・ 患者の心電図信号を心電計 (ECG) に伝達する装置。
- ・ 本品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

- * 1. ディスポーザブル電極を人体の指定位置に貼り付ける。
- * 2. ホルタ心電計に接続された本品をディスポーザブル電極へ取り付け、心電図を記録する

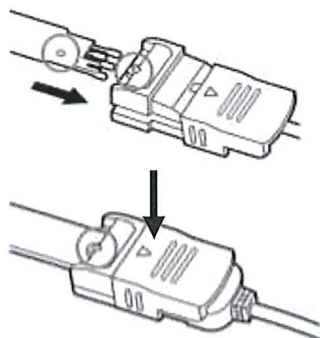

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・ 本品を電極や機器本体等からはずす際は、コードを持たずにコネクタを持ってはずして下さい。[断線のおそれがあります]
- ・ 指定の装置以外への接続は、行わないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・ 水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないで下さい。

使用温度: 10~45℃

使用湿度: 10~95%

有効期間・耐用期間

- ・ 有効使用年数 (自主基準)
有効期間 (耐用期間): 1 年
但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがあります。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 本品使用後は、水またはぬるま湯に湿らせたガーゼ、または酒精綿で清拭して下さい。

- **・ シンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。
コードを拭く際は、接続コネクタ等からコードを引っ張るように拭かず、コード部を握って拭くこと。[コード被覆の劣化を促進し、破損のおそれがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん液等の消毒液はコード被覆の劣化を促進します。]
- ・ 清拭後は乾燥していることを確認してご使用下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社
TEL (042) 560-5661 FAX (042) 560-8934

発売元

株式会社スズケン
愛知県名古屋市東区東片端町 8 番地
TEL (052) 950-6325 FAX (052)-962-7440