

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010


負荷心電図入力コード PC-127

【禁忌・禁止】

- ・MRI でのご使用はできません。
[誘導起電力による局所的な発熱で、被検者が火傷を負うことがあります。]

【形状・構造及び原理等】

*構成品と種類

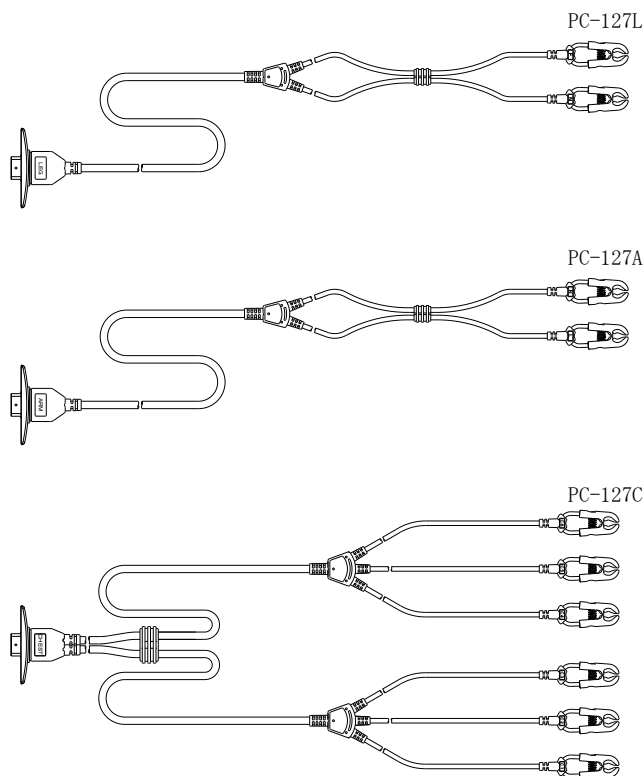

*種類

品番	備考	構成
PC-127	12 誘導 (セット品)	3 本入/組
PC-127L	四肢部：両足	1 本入
PC-127A	四肢部：両手	1 本入
PC-127C	胸部	1 本入

【使用目的又は効果】

使用目的

- ・患者の心電図信号を心電計 (ECG) に伝達する装置。
- ・本品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

1. 本品のコネクタを機器本体のコネクタ部に接続する。
2. 本品に四肢電極、及び胸部電極を接続する。
3. 四肢電極、及び胸部電極を被検者に取り付け、心電図を記録する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・本品を電極や機器本体等からはずす際は、コードを持たずにコネクタを持ってはずして下さい。[断線のおそれがあります]
 - ・本品は、薬液や水に触れないようにし、濡れた状態では使用しないで下さい。
 - ・指定の装置以外への接続は、行わないで下さい。
- *・本品の分岐部及び電極装着部は防水仕様ではありません。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないで下さい。
- 使用温度： 10～40℃
使用湿度： 30～85%

使用期間

- ・有効使用年数 (自主基準)
有効期間 (耐用期間)：1 年
但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがあります。

【保守・点検に係る事項】

- ・本品使用後は、水またはぬるま湯に湿らせたガーゼ、または酒精綿で清拭して下さい。
- *・シンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。
コードを拭く際は、接続コネクタ等からコードを引っ張るように拭かず、コード部を握って拭くこと。[コード被覆の劣化を促進し、破損のおそれがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん液等の消毒液はコード被覆の劣化を促進します。]
- ・清拭後は乾燥していることを確認してご使用下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社
TEL (042) 560-5661 FAX (042) 560-8934

発売元

株式会社スズケン
愛知県名古屋市中区東片端町 8 番地
TEL (052) 950-6325 FAX (052) 962-7440