


機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びブリード 35562010

心電図入力コード Q T ー

【禁忌・禁止】

- ・MRI でのご使用はできません。
[誘導起電力による局所的な発熱で、被験者が火傷を負うことがあります。]

【形状・構造及び原理等】

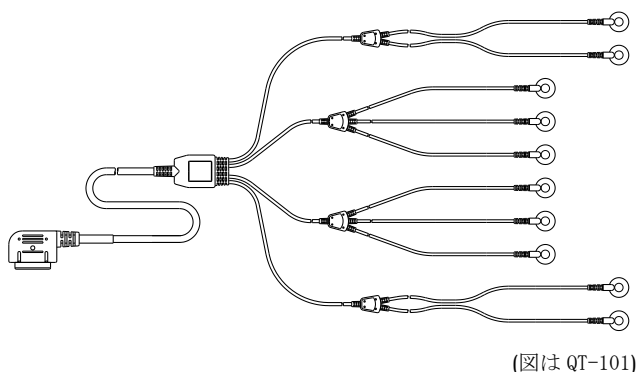

品 番	備 考
QT-101	1 2 誘導タイプ

【使用目的・効能又は効果】

＜使用目的＞

- ・患者の心電図信号を心電計（ECG）に伝達する装置。
- ・本品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【品目仕様等】

項目	仕様
導通抵抗	50Ω 以下
絶縁抵抗	DC1000V、100MΩ 以上

【操作方法または使用方法等】

- 1.被験者にディスプレイ電極を取り付けた後、本品を電極に接続する。
- 2.本品のコネクタを機器本体のコネクタ部に接続し、心電図を記録する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・改造は、絶対に行わないで下さい。[重大な事故の原因となることがあります。]
- ・本品を電極や機器本体等からはずす際は、コードを持たずにコネクタを持ってはずして下さい。[断線のおそれがあります]
- ・本品は、薬液や水に触れないようにし、濡れた状態では使用しないで下さい。
- ・指定の装置以外への接続は、行わないで下さい。
- *・本品の分岐部及び電極装着部は防水仕様ではありません。

【貯蔵・保管方法および使用期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないで下さい。

使用温度： 10～45℃

使用湿度： 10～95%

＜使用期間＞

- ・有効使用年数（自主基準）
有効期間（耐用期限）：1 年
但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがあります。

【保守・点検に係る事項】

- ・本品使用後は、水またはぬるま湯に湿らせたガーゼ、または酒精綿で清拭して下さい。
- *・シンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。
コードを拭く際は、接続コネクタ等からコードを引っ張るように拭かず、コード部を握って拭くこと。[コード被覆の劣化を促進し、破損のおそれがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん液等の消毒液はコード被覆の劣化を促進します。]
- ・清拭後は乾燥していることを確認してご使用下さい。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売者
フタミ・エム・イー工業株式会社
〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平 1-46-3
製造業者
フタミ・エム・イー工業株式会社

発売元

株式会社スズケン
愛知県名古屋市中区東片端町 8 番地
TEL (052) 950-6325 FAX (052) -962-7440