


機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010
心電図入力コード PC-128

【禁忌・禁止】

- ・MRIでのご使用はできません。
[誘導起電力による局所的な発熱で、被検者が火傷を負うことがあります。]

***【形状・構造及び原理等】**

****構成部品と種類**

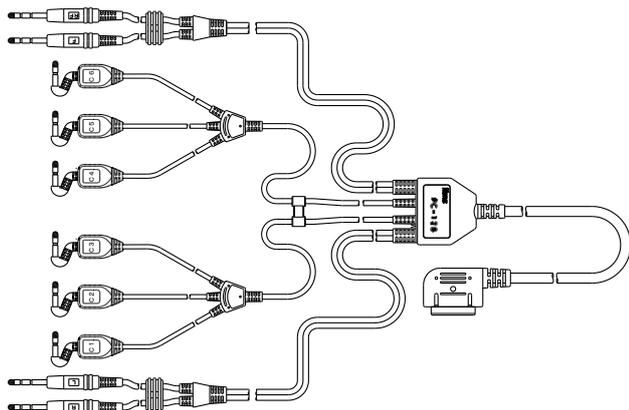

****種類**

品番	備考
PC-128	1 2誘導タイプ

【使用目的又は効果】

使用目的

- ・患者の心電図信号を心電計 (ECG) に伝達する装置。
- ・本品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

- 1.本品に電極を取り付ける。
- 2.本品のコネクタを機器本体のコネクタ部に接続する。
- 3.電極を被検者に取付け、心電図を記録する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本品を電極や機器本体等からはずす際は、コードを持たずにコネクタを持ってはずして下さい。[断線のおそれがあります]
 - ・本品は、薬液や水に触れないようにし、濡れた状態では使用しないで下さい。
 - ・指定の装置以外への接続は、行わないで下さい。
- **・本品は防水仕様ではありません。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないで下さい。
使用温度: 10~45℃
使用湿度: 10~95%

使用期間

- ・有効使用年数 (自主基準)
有効期間 (耐用期間): 1年
但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがあります。

【保守・点検に係る事項】

- ・本品使用後は、水またはぬるま湯に湿らせたガーゼ、または酒精綿で清拭して下さい。
- **・シンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。
コードを拭く際は、接続コネクタ等からコードを引っ張るように拭かず、コード部を握って拭くこと。[コード被覆の劣化を促進し、破損のおそれがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん液等の消毒液はコード被覆の劣化を促進します。]
- ・清拭後は乾燥していることを確認してご使用下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社
TEL (042) 560-5661 FAX (042) 560-8934

発売元

株式会社スズケン
愛知県名古屋市中区東片端町8番地
TEL (052) 950-6325 FAX (052) 962-7440