

機械器具 21 内臓機能検査用器具  
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010

## 心電図入力コード PCH-


### 【禁忌・禁止】

- ・MRIでのご使用はできません。  
[誘導起電力による局所的な発熱で、被検者が火傷を負うことがあります。]


### 【形状・構造及び原理等】

\*\*構成品と種類


PCH-1201-1 3電極用

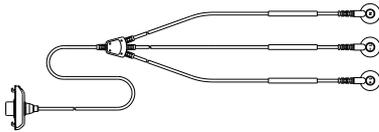

PCH-1201-2 5電極用

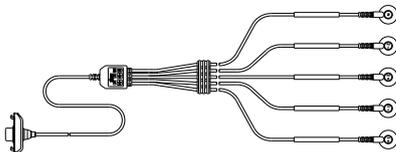


\*PCH-1201-2\_3/S 2ch: 3電極仕様

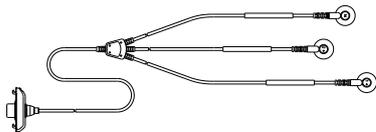


PCH-1201-3 7電極用


\*PCH-1201-3\_7/L 7電極 (PCH-1201-3のコード長を延長)

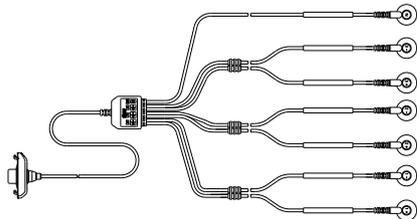

PCH-1201-12 10電極用

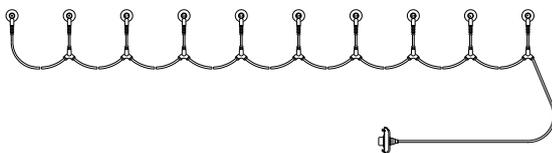

\*\*PCH-1201-CR カルディロード用

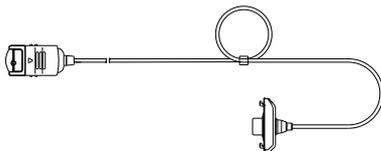

### 【使用目的又は効果】

#### 使用目的

- ・患者の心電図信号を心電計 (ECG) に伝達する装置。
- ・本品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

### 【使用方法等】

1. 被検者にディスプレイ電極を取り付けた後、本品を電極に接続する。
2. 本品のコネクタを機器本体のコネクタ部に接続し、心電図を記録する。

### 【使用上の注意】

#### \*\*<重要な基本的注意>

- ・本品を電極や機器本体等からははずす際は、コードを持たずにコネクタを持ってはずして下さい。[断線のおそれがあります]
- \*\*PCH-1201-CR カルディロード用以外のコードは防水仕様ではありません。水に触れないようにし、濡れた状態では使用しないで下さい。
- ・指定の装置以外への接続は行わないで下さい。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### <保管方法>

- ・水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないで下さい。
- 使用温度: 10~45℃
- 使用湿度: 10~95%

#### <有効期間・耐用期間>

- ・有効使用年数 (自主基準)
- 有効期間 (耐用期間): 1年
- 但し、これは推奨された環境で使用された場合で使用状況により差異が生じることがあります。

### 【保守・点検に係る事項】

- ・本品使用後は、水またはぬるま湯に湿らせたガーゼ、または酒精綿で清拭して下さい。
- \*\*シンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。コードを拭く際は、接続コネクタ等からコードを引っ張るように拭かず、コード部を握って拭くこと。[コード被覆の劣化を促進し、破損のおそれがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん液等の消毒液はコード被覆の劣化を促進します。]
- ・清拭後は乾燥していることを確認してご使用下さい。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社

TEL (042) 560-5661 FAX (042) 560-8934

発売元

株式会社スズケン

愛知県名古屋市中区東片端町8番地

TEL (052) 950-6325 FAX (052) -962-7440