


機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010

心電図入力コード PC-1010

【禁忌・禁止】

- ・MRIでのご使用はできません。
[誘導起電力による局所的な発熱で、被検者が火傷を負うことがあります。]

**【形状・構造及び原理等】

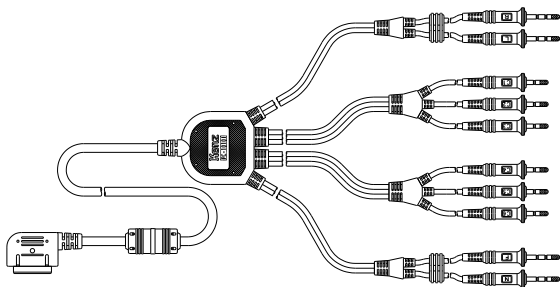

(図はPC-1010I)

品番	備考
PC-1010I	絶縁型Φ3プラグタイプ
PC-1010A	絶縁型4MMバナナタイプ

<原理>

- ・体表面に設置された電極から体表面の心電信号を心電波形処理装置に伝達する導体。この活動電位を記録する装置は、主に心電計(ECG)である。

<仕様>

項目	仕様
導通抵抗	9～11 kΩ
絶縁抵抗	DC1000V、100MΩ以上

【使用目的又は効果】

<使用目的>

- ・患者の心電図信号を心電計(ECG)に伝達する装置。本品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

- 1.本品に四肢電極、及び胸部電極を接続する。
- 2.本品のコネクタを機器本体のコネクタ部に接続する。
- 3.四肢電極、及び胸部電極を被検者に取り付け、心電図を記録する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本品を電極や機器本体等からはずす際は、コードを持たずにコネクタを持ってはずして下さい。[断線のおそれがあります]
- ・本品は、薬液や水に触れないようにし、濡れた状態では使用しないで下さい。
- ・指定の装置以外への接続は、行わないで下さい。
- *・本品は防水仕様ではありません。

【保管方法及び有効期間等】

<貯蔵・保管方法>

- ・水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないで下さい。
- 使用温度： 10～40℃
- 使用湿度： 30～90%

<有効期間>

- ・有効使用年数(自主基準)
有効期間(耐用期限)：1年 [自己認証(当社データ)による]
但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがあります。

【保守・点検に係る事項】

- ・本品使用後は、水またはぬるま湯に湿らせたガーゼ、または酒精綿で清拭して下さい。
- *・シンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。
コードを拭く際は、接続コネクタ等からコードを引っ張るように拭かず、コード部を握って拭くこと。[コード被覆の劣化を促進し、破損のおそれがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん液等の消毒液はコード被覆の劣化を促進します。]
- ・清拭後は乾燥していることを確認してご使用下さい。

【包装】

1本/1梱包

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者
フタミ・エム・イー工業株式会社
TEL(042)560-5661 FAX(042)560-8934

発売元
株式会社スズケン
愛知県名古屋市中区東片端町8番地
TEL(052)950-6325 FAX(052)-962-7440