

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード
JMDN コード：35562010

タブ電極リード線 CL-1010

【警告】

＜適用対象(患者)＞

患者に異常がないことを絶えず監視し、異常が発見された場合はただちに患者が安全であるように、機器の動作を止めるなどの適切な措置を講じること。

＜使用方法＞

医師または医師の指示を受けた者以外は、本製品を使用しないこと。

【禁忌・禁止】

MRI で使用しないこと。

誘導起電力による局所的な発熱で、患者が熱傷を負う恐れがあるため。]

【形状・構造及び原理等】



【仕様】

導通抵抗：5 Ω 以下

【動作保証条件】

使用温度：10～40℃

使用湿度：25～95%（結露しないこと）

【使用目的又は効果】

- 患者の心電図信号を心電計（ECG）に伝達する装置をいう。本品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

- 本品のコネクタを各々対応する心電誘導コードのφ3プラグ部に接続します。
- 患者側にタブ型ディスプレイ電極を取り付けた後、ワニ口式の電極接続部へ接続します。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 本品を心電誘導コード及びタブ型ディスプレイ電極から外す際は、必ずコネクタ及びワニ口式の電極接続部を持って外してください。[断線する恐れがあります。]
- 指定の装置以外には使用しないでください。[重大な事故の原因となることがあります。]
- ホック型のディスプレイ電極を本品のワニ口式の電極接続部に挟まないでください。[破損する恐れがあります。]
- 本品は防水仕様ではありません。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 高温多湿になる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等を避けて保管してください。

保管温度：-10～60℃

保管湿度：10～95%（結露しないこと）

＜使用期間＞

- 有効使用年数（自主基準）
有効期間（耐用期間）：1年
但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがあります。

【保守・点検に係る事項】

- 本品使用後は、中性洗剤または70%程度のイソプロピルアルコールで清拭してください。
- 清拭にはシンナー、トルエン等は使用しないでください。
[ケーブル被覆の劣化を促進し破損の恐れがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん液等の消毒液はケーブル被覆の劣化を促進します。]
- 清拭後は乾燥していることを確認してから使用してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社

TEL：042-560-5661 FAX：042-560-8934

お問い合わせ先

株式会社スズケン

名古屋市東区東片端町8番地

TEL：052-950-6325 FAX：052-962-7440