

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010


クリップ電極リード TR-

【禁忌・禁止】

- ・MRI でのご使用はできません。
[誘導起電力による局所的な発熱で、被検者が火傷を負うことがあります。]

【形状・構造及び原理等】

*構成品と種類

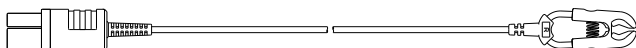

(図は TR-653-91R)

*種類

No.	品番	備考	包装
1	TR-653-91R	(R 赤)クリップ式	1 本入
2	TR-653-91L	(L 黄)クリップ式	1 本入
3	TR-653-91N	(N 黒)クリップ式	1 本入
4	TR-653-91F	(F 緑)クリップ式	1 本入

仕様

項目	仕様
導通抵抗	5Ω 以下
絶縁抵抗	DC1000V、100MΩ 以上

【使用目的又は効果】

使用目的

- ・患者の心電図信号を心電計 (ECG) に伝達する装置。本品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

1. 被検者にディスプレイ電極を取り付けた後、本品を電極に接続する。
2. 本品のコネクタをアダプタケーブルのコネクタ部に接続し、心電図を記録する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本品を電極やアダプタケーブル等からはずす際は、コードを持たずにコネクタを持ってはずして下さい。[断線のおそれがあります]
- ・本品は、薬液や水に触れないようにし、濡れた状態では使用しないで下さい。[クリップ部はヒビテン、希ヨード等 消毒液が付着すると電気導電性を損ない、また乾燥固化することがありますが、これはクリップ部の樹脂が溶けているものではありません。]
- ・指定の装置以外への接続は、行わないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・保管環境及び保管の注意
水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないで下さい。
使用温度： 10～40℃
使用湿度： 30～85%

*耐用期間

- 1 年 (自主基準) 但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがあります。

【保守・点検に係る事項】

- ・本品使用後は、水またはぬるま湯に湿らせたガーゼ、または酒精綿で清拭して下さい。
- *・本品は防水仕様ではありません。流水や水没させての洗浄は行わないでください。
- *・シンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないで下さい
コードを拭く際は、接続コネクタ等からコードを引っ張るように拭かず、コード部を握って拭いてください。[コード被覆の劣化を促進し、破損のおそれがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん液等の消毒液はコード被覆の劣化を促進します。]
- ・清拭後は乾燥していることを確認してご使用下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社
TEL：042-560-5661 FAX：042-560-8934

販売元

トーイツ株式会社
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-5-10
TEL：03(3496)1121