


機械器具 21 内臓機能検査用器具
 一般医療機器 心電計ケーブル及びリード
 JMDNコード: 35562010

心電計用リード

【禁忌・禁止】

MRIで使用しないこと。
 [誘導起電力により局部的に発熱し火傷する恐れがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

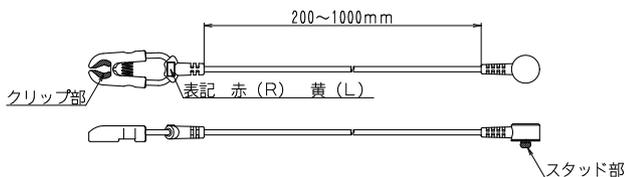

【使用目的又は効果】

- 患者の心電図信号を心電計(ECG)に伝達する装置をいう。本品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

1. 本品のスタッド部分に心電計装置を接続します。
2. 患者側に心電用電極を取り付けた後、クリップ部を接続します。

組み合わせて使用する医療機器

本品は以下の医療機器に接続することができます。詳細は接続する医療機器の取扱説明書を参照してください。

販売名	医療機器認証番号
myBeat ホーム ECG	228A0BZX00010000

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 本品を心電計装置及び心電用電極から外す際は、必ず心電計装置及び心電用電極を取り付けたクリップ部を持って外してください。[断線する恐れがあります。]
- 指定の装置以外には使用しないでください。[重大な事故の原因となることがあります。]
- 本品は防水仕様ではありません。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- 高温多湿になる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等を避けて保管してください。

保管温度: -10~60℃

保管湿度: 10~95% (結露しないこと)

<使用期間>

- 有効使用年数(自主基準)
 有効期間(耐用期間): 1年
 但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがあります。

【保守・点検に係る事項】

- 本品使用後は、中性洗剤または70%程度のイソプロピルアルコールやエタノールで清拭してください。
- 清拭にはシンナー、トルエン等は使用しないでください。
 [ケーブル被覆の劣化を促進し破損の恐れがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん液等の消毒液はケーブル被覆の劣化を促進します。]
- 清拭後は乾燥していることを確認してから使用してください。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
 フタミ・エム・イー工業株式会社
 TEL: 042-560-5661 FAX: 042-560-8934