

機械器具 21 内臓機能検査用器具  
一般医療機器 頭皮脳波用電極 11440001


## 生体電極（銀皿）

### 【禁忌・禁止】

1. 本電極は未滅菌品です。生体の皮膚表面以外には使用できません。
2. MRI室でのご使用はできません。
3. 皮膚疾患や創傷のある部位には使用しないでください。

### 【形状・構造及び原理】

\*構成品と種類

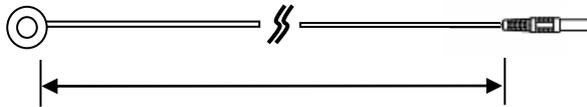

1000~1500mm ±20%

\*種類

No.	品番	備考	包装
1	MA-C001-10	銀 DIN プラグ(1m)	10本入
2	MA-C001-15	銀 DIN プラグ(1.5m)	10本入

### 【使用目的又は効果】

主として脳波計と組み合わせて、生体の頭皮上から電気現象を導出する。

### 【使用方法等】

使用する前に必ず使用上の注意を読んでください。

1. 被検者の電極装着部位を酒精綿等で油脂などをよく拭き取って後、電極に脳波ペースト等を適量つけて頭皮に固定します。
2. 本品の接続コネクタを脳波計の電極入力部に接続します。
3. 使用後の処置
  - ・電極を頭皮からゆっくり外し、頭皮に付着した脳波ペーストを酒精綿等で拭き取ります。
  - ・電極部に付着した脳波ペーストは、水で洗い流した上、水分を拭き取り乾燥させます。

### 【使用上の注意】

#### <重要な基本的注意>

- ・傷ついた皮膚部分には絶対に電極を装着しないこと。
- ・既知のアレルギーが有る場合には、事前に医師等に相談すること。
- ・脳波ペーストにより皮膚炎症などを起こした場合には使用をただちに止めて医師に相談すること。

### 電極の使用中の注意

- ・検査に必要な時間を超えて使用しないこと。
- ・電極の装着に異常のないことを確認すること。

### 電極の取り扱いの注意

- ・コネクタは、装置の指定された入力端子にしっかり接続すること。
- ・電極を装置から外す時は、コネクタ部を持って静かに引き抜くこと。リード線を強く引っ張らないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法

- ・水分、気圧、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などの影響を受けるおそれのない暗部な場所に保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

#### \*耐用期間

1年（自主基準） 但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがあります。

#### 【保守・点検に係る事項】

- ・電極に付着した脳波ペーストは、水で洗い流した上、水分を拭き取り乾燥させること。
- ・長時間、水に浸けておかないこと。
- ・コネクタ部は水が掛からないように注意すること。
- ・電極表面を清掃するときは、ブラシ等のいかなる物理的圧力を加えないこと。
- \* 本製品は防水仕様ではありません。流水や水没させての洗浄は行わないこと。
- \* シンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。コードを拭く際は、接続コネクタ等からコードを引っ張るようには拭かず、コード部を握って拭くこと。[コード被覆の劣化を促進し、破損のおそれがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん液等の消毒液はコード被覆の劣化を促進します。]
- ・清拭後は乾燥していることを確認して使用すること。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社

TEL : 042-560-5661 FAX : 042-560-8934