

機械器具 21 内臓機能検査用器具  
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010

## 心電リードケーブル E F O 1

### 【禁忌・禁止】

- ・MRIでのご使用はできません。  
[誘導起電力による局所的な発熱で、被検者が火傷を負うことがあります。]

### 【形状・構造及び原理等】

\*構成品と種類



(写真は SZ47902A11)

\*種類

No.	品番	備考
1	SZ47902A11	コード全長 2900mm±50mm
**2	SZ47902A22	コード全長 2900mm±50mm 電極接続部 クリップタイプ

仕様

項目	仕様
導通抵抗	5Ω以下
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上

### 【使用目的又は効果】

#### 使用目的

- ・患者の心電図信号を心電計（ECG）に伝達する装置。本品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

### 【使用方法等】

1. 被検者にディスプレイ電極を取り付けた後、本品を電極に接続する。
2. 本品のコネクタを機器本体のコネクタ部に接続し、心電図を記録する。

### 【使用上の注意】

#### <重要な基本的注意>

- ・本品を電極や機器本体等からははずす際は、コードを持たずにコネクタを持ってはずすこと。[断線のおそれがあります。]
- ・本品は、薬液や水に触れないようにし、濡れた状態では使用しないこと。
- ・指定の装置以外への接続は、行わないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法

- ・保管環境及び保管の注意  
水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないこと。  
使用温度： 10～40℃  
使用湿度： 30～85%

#### \*耐用期間

1年（自主基準） 但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがあります。

### 【保守・点検に係る事項】

- ・本品使用後は、水またはぬるま湯に湿らせたガーゼ、または酒精綿で清拭すること。
- ・本品は防水仕様ではありません。流水や水没させての洗浄は行わないこと。
- ・シンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないこと。  
コードを拭く際は、接続コネクタ等からコードを引っ張るように拭かず、コード部を握って拭くこと。[コード被覆の劣化を促進し、破損のおそれがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん液等の消毒液はコード被覆の劣化を促進します。]
- ・清拭後は乾燥していることを確認して使用すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社

TEL：042-560-5661 FAX：042-560-8934

発売元

株式会社ユネクス

愛知県名古屋市中区栄2丁目6番1号

TEL 052-229-0820 FAX 052-229-0823