

機械器具 21 内蔵機能検査用器具  
一般医療機器 頭皮脳波用電極 11440001

## 生体電極ケーブル (スリープスコープ用)

### 【禁忌・禁止】

- ・MRIでのご使用はできません。  
[誘導起電力による局所的な発熱で、被検者が火傷を負うことがあります。]

### 【形状・構造及び原理等】

\*構成品と種類



\*\* (写真はホックタイプ)

\*種類

電極取付部	包装
Y型電極クリップ	1個/1梱包
ホックタイプ	1個/1梱包

仕様

項目	仕様
導通抵抗	5Ω以下
絶縁抵抗	DC500V、10MΩ以下

### 【使用目的又は効果】

#### 使用目的

- ・頭皮において脳の様々な領域の電位変化を記録する。この電気活動を記録する一般的な装置は脳波計 (EEG) である。
- ・本品の電極接続部にはクリップタイプとホックタイプがあります。

### 【使用方法等】

1. 被検者にディスプレイ電極を取り付けた後、本品の電極に接続する。
2. 本品のコネクタを機器本体のコネクタ部に接続し、生体電気現象を記録する。

### 【使用上の注意】

#### <重要な基本的注意>

- ・本品を電極や機器本体等からはずす際は、コードを持たずにコネクタを持ってはざすこと。[断線のおそれがあります。]
- ・本品は、薬液や水に触れないようにし、濡れた状態では使用しないこと。[電極接続部はヒビテン、希ヨード等 消毒液が付着すると電気導電性を損ない、また乾燥固化することがありますが、これは電極接続部の樹脂が溶けているものではありません。]
- ・指定の装置以外への接続は、行わないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法

- ・水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないこと。

使用温度: 10~40℃

使用湿度: 30~85%

#### \*耐用期間

1年 [自己認証(当社データ)による]

但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがあります。

### 【保守・点検に係る事項】

- ・本品使用後は、水またはぬるま湯に湿らせたガーゼ、または酒精綿で清拭すること。
- ・本品は防水仕様ではありません。流水や水没させての洗浄は行わないでください。
- ・シンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないで下さい  
コードを拭く際は、接続コネクタ等からコードを引っ張るように拭かず、コード部を握って拭いてください。[コード被覆の劣化を促進し、破損のおそれがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん液等の消毒液はコード被覆の劣化を促進します。]
- ・清拭後は乾燥していることを確認して使用すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社

TEL: 042-560-5661 FAX: 042-560-8934