


機械器具 21 内臓機能検査用器具
 一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010

ECG入力ケーブル

【禁忌・禁止】

- ・MRIでのご使用はできません。[誘導起電力による局所的な発熱で、被検者が火傷を負うことがあります。]

【形状・構造及び原理等】

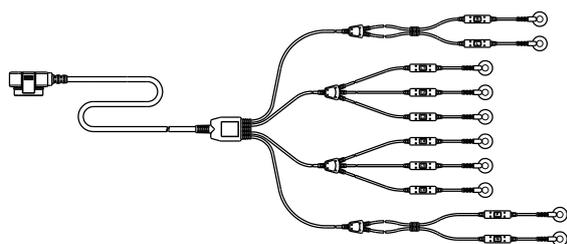

(図はホックタイプ10電極)

種類

No	構成
1	ホックタイプ 10電極
2	クリップタイプ 10電極
3	ピンタイプ 10電極

【使用目的又は効果】

- ・患者の心電図信号を心電計(ECG) に伝達する装置です。本品はあるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付けます。

【使用方法等】

- ・本品のコネクタを指定された心電計と接続します。
- ・本品の電極取付部に電極を取り付けます。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・指定の装置以外への接続は、行わないでください。
[重大な事故の原因となることがあります。]
- ・本品を装置から抜くときは、線材を持たずにコネクタ部を持って抜いてください。[断線の恐れがあります。]
- ・本品は防水仕様ではありません。

【保管方法及び有効期間等】

- ・水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないでください。
 使用温度 10~40℃
 使用湿度 25~95%

使用期間

耐用期間: 2年 [自己認証(当社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

- ・使用後は、中性洗剤または70%イソプロピルアルコールで清拭してください。
- ・シンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。コードを拭く際は、接続コネクタ等からコードを引っ張るように拭かず、コード部を握って拭いてください。[コード被覆の劣化を促進し、破損のおそれがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん液等の消毒液はコード被覆の劣化を促進します。]
- ・拭いた後は乾燥していることを確認してご使用ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
 フタミ・エム・イー工業株式会社

連絡先(販売店)
 株式会社 グッドケア
 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山 1-1-1 伊勢山ビル 7B
 電話番号: 052-322-0627