

類 別 機械器具 5 0 開創又は開孔用器具  
一般的名称 挿管用喉頭鏡(70948009)  
クラス別 一般医療機器(クラスI)

## 販売名 普及型喉頭鏡(マッキントッシュ式、ミラー式)

### [禁忌・禁止]

本製品を曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次的加工(改造)することは、折損等の原因となるので絶対に行わないこと。  
又、使用前に必ず洗浄・滅菌を行い、使用目的以外の目的で使用しないこと。

### \*\*【形状・構造及び原理等】

#### 形状

サイズの異なるブレードとハンドルから構成され、組み立てて使用する。

マッキントッシュ式ブレード ミラー式ブレード ブレード、ハンドル組立時



#### 原材料

ブレード部：ステンレス鋼、ハンドル部：真鍮クロムメッキ

#### 原理

電球を取り付けたブレードを乾電池を入れたハンドルに装着することで、電球が点灯し喉頭及びその周辺を照射し観察を容易にする。

### \*\*【使用目的又は効果】

麻酔又は救急医療等で、気道確保のために気管(人の気道)への気管内チューブの挿入、配置を支援したり、異物を除去したりするために用いる器具をいう。喉頭及びその周辺の観察、診断、治療にも用いる。ハンドル、ブレードから成る。

### \*\*【使用方法】

- (1) 患者の体型や症状に適したブレードを選択する。
- (2) ブレードに電球を装着する。
- (3) ハンドルに電池を装着する。
- (4) ブレードのフック部をハンドルのバーに引っ掛け、ハンドルと直角になる(カチッとなる)まで起こす。
- (5) 電球が正常に点灯していることを確認し使用する。
- (6) 使用後は、ブレードをハンドルから外す。

### \*【使用上の注意】

- (1) 本品をクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)患者、又はその疑いのある患者に使用した場合は、クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)に関する国内規制及びガイドライン等を遵守すること。
- (2) 使用前に必ず洗浄・滅菌(保守・点検に係る事項参照)すること。
- (3) 使用目的(手術・処置等の医療行為)以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。

- (4) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- (5) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるのでできるだけ使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。
- (6) 本製品を曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次的加工(改造)することは、破損等の原因となるので絶対に行わないこと。

### 【貯蔵方法】

- (1) 貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥すること。
- (2) 滅菌済のものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管すること。

### \*\*【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。但し、電球及び電池は洗浄・消毒又は滅菌をする前に必ず取り外すこと。
- (2) 洗浄
  - ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
  - ・洗浄装置(ウォッシャーディスインフェクタ等)で洗浄するときには、本器同志が強く接触し損傷することがないように注意すること。又、超音波洗浄器での洗浄は行わないこと。
  - ・金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。
  - ・洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げすぎには、浄化水(濾過、蒸留、脱イオン化等)を用いることを推奨する。
  - ・洗浄後は、腐食防止のために、直ちに且十分に乾燥させること。
- (3) 消毒
  - ・強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。又、使用中に付着したときには、水洗いすること。
- (4) 滅菌
  - ・ブレードは電球を外し134℃・5分でのオートクレーブが可能。
  - ・ハンドルは消毒液による消毒を推奨する。但し、滅菌が必要な場合は電池を外し134℃・5分でのオートクレーブが可能。
  - ・フラッシュオートクレーブ又はホットエアステライザーでの滅菌は行わないこと。
- (5) 使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、電球等に異常がないか点検をすること。
- (6) 洗浄・滅菌の後には、必ずブレードとハンドルを接続し電球が点灯することを確認すること。点灯しない場合は電球、電池及び電気接点を点検すること。

【包装単位】：1個入/箱

### 【製造販売業者名称及び住所等】

福川産業株式会社  
東京都文京区本郷4-1-1 TEL：03-3812-3915  
外国製造所：Medical Devices (Pvt.) Limited (パキスタン)