

機械器具 32 医療用吸引器  
一般医療機器 吸引器用キャニスタ JMDNコード: 34858000

## ハンディビーミス

再使用禁止


### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

〈使用方法〉

チューブは用途以外の箇所に接続しないこと。[接続を間違えると接続機器が汚染されるおそれがある。]

### 【形状・構造及び原理等】

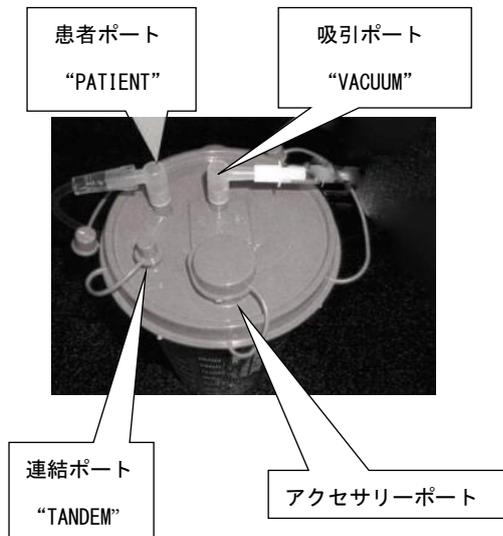

品番	仕様	包装
dd3002	容器 3000ml	36 個/箱
dd4944	容器 2000ml	48 個/箱
dd4844	容器 1200ml	48 個/箱

### 【使用目的又は効果】

本品は体液の回収のため吸引器とともに用いる。  
(本品は製造専用として使用される医療機器)である。

### 【使用方法等】

1. ふたをキャニスタに確実に取り付けること。
2. 連結ポート、アクセサリポートはキャップで閉じる。
3. 吸引ポートにチューブを取り付けて吸引器に接続する。
4. 患者ポートにチューブと取り付ける。
5. 連結使用の場合は、連結ポートと患者ポートをチューブでつなぐこと。
6. スタンド等を用いて安定した状態で設置します。
7. 吸引力を調節して、吸引を開始する。
8. キャニスタが満杯になると、ふた内部のストッパー機能が働き、吸引が停止する。
9. 凝固剤を入れる時はアクセサリポートを用いること。
10. 吸引ポート及び患者ポートに取り付けたチューブをはずし、すべてのキャップを閉じる。
11. 廃棄の際は、廃棄物処理規定に従って処理すること。

### 【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 使用前にふたの取り付け、キャップの閉め、チューブの接続を確実にし、漏れがないことを確認すること。
2. キャニスタは、倒れたり、物をぶつけて割れる恐れがあるので安定した状態で設置すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて室温で保管すること。

〈有効期間〉

製品の外箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(自社データ)による]

### 【主要文献及び文献請求先】

名称: 株式会社フジメディカル  
TEL: 03-3356-8377

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:  
株式会社 フジメディカル  
〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F  
TEL 03-3356-8377

外国製造業者:

ビーミス マニュファクチャリング社  
Bemis Manufacturing Company  
アメリカ

  
株式会社フジメディカル