

機械器具 38 医療用鉤
一般医療機器 鉤 JMDNコード: 35105000

ジャクソン腔鉤

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

本品の二次的加工を行わないこと。

【破損の原因となる】

【形状・構造及び原理等】

本品は、軸様のハンドルとへら状の遠位点が一体で構成されている。



商品番号	仕様
64-324	巾40mm 長さ108mm

【使用目的又は効果】

本品は、軸用のハンドルを持ち、へら状の先端部を腔内に挿入して拡張・伸張し、腔腔深部や子宮頸部を検査、診察または治療を行うために用いる。

本品は再使用可能である。

【使用方法等】

- 1.使用前に洗浄・滅菌済みであることを確認すること。本品の表面に損傷及び曲がり等異常の無いことを、確認すること。
- 2.ハンドル部分を把持・操作し先端部を腔内に挿入する。
- 3.使用後は、本品に異常が無いことを確認し、感染防止のため血液・体液・薬品等の付着物が乾燥しないうちに洗浄を行うこと。
- 4.洗浄・滅菌後は適切に保管すること。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1.過剰な力を加える等無理な使用は避けること。

〈その他注意〉

- 1.防錆処理のための油引きがされている場合、洗浄等で除去し滅菌処理を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

次の使用まで汚染等に注意し清潔・乾燥が保てる場所に保管すること。

〈有効期間〉

滅菌して保管する場合、滅菌有効期限の管理をすること。

【保守・点検に係る事項】

〈洗浄〉

- 1.使用後直ちに洗浄を行うこと。また洗浄時は手袋を着用する。
- 2.強酸性・強アルカリ性の洗剤等は使用しないこと。中性洗剤の使用を推奨する。
- 3.超音波洗浄装置やウォッシャーディスインフェクタ等の装置で洗浄する場合、器具先端の接触による破損に注意しバスケット等に収納すること。
- 4.金属タワシやクレンザーは、器具の表面を傷つけるので使用しないこと。
- 5.洗剤を充分すすぎ残留させないこと。精製水の使用を推奨する。

〈消毒、滅菌〉

- 1.滅菌器の取り扱い説明に従って操作すること。
- 2.滅菌条件(推奨)

滅菌方法	温度	時間
EOG	52-54℃	60±10分
蒸気	132℃	10分

【主要文献及び文献請求先】

株式会社フジメディカル

TEL: 03-3356-8377

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

株式会社 フジメディカル

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL: 03-3356-8377

外国製造業者:

クーバーサージカル社

Cooper Surgical, Inc.

アメリカ合衆国

