


器 50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 内視鏡用マウスピース JMDN : 70951000
マウスピース (ハード)

再使用禁止

【禁忌・禁止】
〈使用方法〉
再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

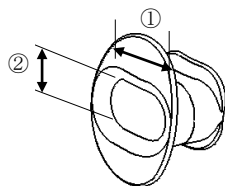

①長径 / ②短径

品番	仕様	包装
PM0022	長径 26mm x 短径 14mm	30 個/箱

材質: ポリ塩化ビニル (可塑剤: テレフタル酸ジ-2-エチルヘキシル)

【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡使用時に患者の開創状態を保持する器具である。

【使用方法等】

1. 使用前に、用いる内視鏡に本品の形状・サイズが適合していること、本品に異常がないことを確認する。
2. 本品を汚染に十分注意しながら包装内より取り出す。
3. 検査の目的にあった適切な前処置を行う。
4. 患者にマウスピースを咬えさせ、マウスピース開口部より内視鏡を挿入する。
5. 終了後、感染・汚染に注意しながら、本品を口から取り外し、安全に廃棄する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 本品は EOG 滅菌済につき、開封後 1 回限りの使用である。再滅菌・再使用しないこと。
2. マウスピースは、内視鏡と組み合わせて使用するため、内視鏡の挿入部最大径に適合しないものは使用しないこと。
[不適切なサイズの使用は、スコープ及び製品を破損させるおそれがある。]
3. 本品と共に他の製品を使用する場合は、製品の添付文書又は取扱説明書を必ず読み、その指示に従って使用すること。

〈その他の不具合・有害事象〉

1. 本製品の使用により、口内及び唇の損傷が発生することがある。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて室温で保管すること。

〈有効期間〉

製品の外箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証 (自社データ) による]

【主要文献及び文献請求先】

株式会社 フジメディカル
TEL: 03-3356-8377

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

株式会社 フジメディカル

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL: 03-3356-8377

外国製造業者:

パシフィックホスピタルサプライ社

Pacific Hospital Supply Co., LTD.

台湾

FUJI MEDICAL CORPORATION
株式会社 **フジメディカル**