


機械器具 50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 腔鏡 JMDNコード: 15630000

シュア スペック腔鏡

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

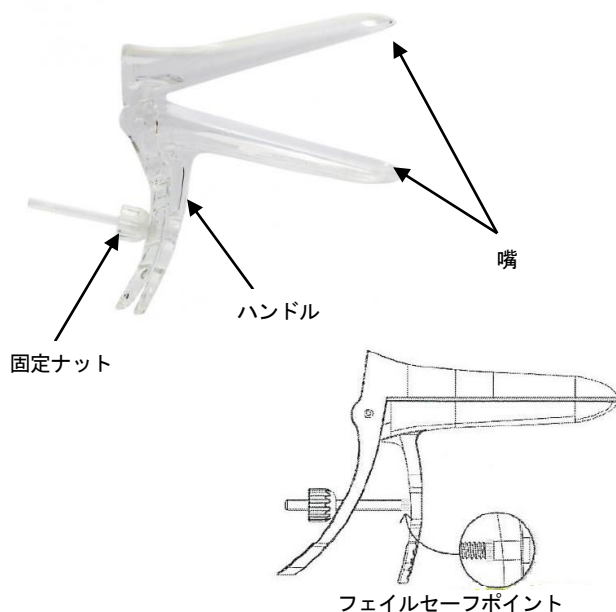

*品番	品名	仕様 (長さX幅X開口時高さ)
VAGSPE-SS	シュア スペック腔鏡 SS	103 X 16 X 63mm
VAGSPE-S	シュア スペック腔鏡 S	103 X 24 X 63mm
VAGSPE-M	シュア スペック腔鏡 M	114 X 31 X 66mm
VAGSPE-L	シュア スペック腔鏡 L	121 X 36 X 70mm
VAGSPE-ML	シュア スペック腔鏡 ML	139 X 28 X 80mm

・材質
ポリスチレン

・原理
本品ハンドルを閉じると嘴状の遠位端が開き、ハンドル下部の固定ナットを回しロックすることにより開度を保持することが出来る。
過重が掛かるとハンドルのフェイルセーフポイントで折れ、腔内での嘴部分の破損を防ぎます。

【使用目的又は効果】

本品は、腔内に挿入し開口し、腔腔内の直接的な観察により、疾患、兆候又は異常の探索に用いる。

【使用方法等】

- 1.使用前に、本品を汚染に十分注意しながら包装から取り出す。
- 2.腔鏡が腔腔に挿入する前に閉じていることを確認する。
- 3.ハンドルを握り、先端部を拡張させる。
- 4.必要に応じてハンドル部の固定ナットを回して先端部を固定する。
- 5.終了後、本品の固定ナットを緩めて先端部の嘴部分を徐々に閉じながら腔内からゆっくり取り出す。

6.使用後は感染・汚染に注意しながら、本品を取り出し、安全に廃棄する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・本品は単回使用である。
- ・潤滑が必要な場合は水溶性の潤滑剤、又は水を使用すること。
- ・患者に適したサイズを選択すること。
- ・折れの原因となるので、本品に過剰な応力をかけないこと。

〈不具合・有害事象〉

・本製品の使用により、腔炎や腔壁の損傷、出血等が発生することがある。その場合は手技を行うのに十分な分だけ開くこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- ・水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて室温で保管すること。

〈使用期間〉

- ・製品の外箱の使用期限欄を参照すること

【主要文献及び文献請求先】

株式会社 フジメディカル
TEL:03-3356-8377

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

株式会社 フジメディカル
〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
TEL:03-3356-8377

外国製造業者:

Omnimate Enterprise Co., Ltd.
台湾

FUJI MEDICAL CORPORATION
株式会社 **フジメディカル**