

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  
一般医療機器 短期的使用鼻咽喉頭エアウェイ JMDNコード: 70260000

## 経鼻エアウェイ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

##### 再使用禁止

＜適用対象(患者)＞

次の患者には使用しないこと。

頭蓋骨損傷、鼻骨折、上顎骨骨折、脳出血が疑われる患者

#### \*\*【形状・構造及び原理等】



スプリット



スプリットタイプ

標準タイプ

本品は、エアウェイ先端を鼻腔に沿って患者の咽喉まで挿入し、気道を確保することが出来る。スプリット入りタイプは、エアウェイ挿入後に気管支ファイバースコープ等の手術器具をエアウェイ内腔を経由して挿入した後、エアウェイのみ抜去することができる。

材質: ポリ塩化ビニル(可塑剤: フタル酸ジイソニル)

滅菌: EOG 滅菌

品番	品名	仕様
NAS7000	経鼻エアウェイ (スプリットタイプ)	内径 7.0mm/外径 9.5mm/ 全長約 133mm
NA6000	経鼻エアウェイ (標準タイプ)	内径 6.0mm/外径 8.5mm/ 全長約 110mm
NA6500	経鼻エアウェイ (標準タイプ)	内径 6.5mm/外径 9.0mm/ 全長約 118mm
NA7000	経鼻エアウェイ (標準タイプ)	内径 7.0mm/外径 9.5mm/ 全長約 133mm
NA7500	経鼻エアウェイ (標準タイプ)	内径 7.5mm/外径 10.0mm/ 全長約 140mm
NA8000	経鼻エアウェイ (標準タイプ)	内径 8.0mm/外径 10.5mm/ 全長約 145mm

#### 【使用目的又は効果】

本品は、気道の開存性を維持するために鼻孔から咽喉に挿入する。

#### \*【使用方法等】

- 適切なサイズを選択し、本品に異常がないことを確認する。
- 本品を汚染に十分注意しながら包装内より取り出す。
- 本品の先端に潤滑剤を塗布する。
- 本品を鼻腔から適切な位置まで挿入する。
- 本品からの呼吸を確認する。
- 留置位置が適切であることを随時確認する。
- スプリット入りタイプは、エアウェイ挿入後に気管支ファイバースコープ等の手術器具をエアウェイ内腔を経由して挿入した後、エアウェイのみスプリット部を開いて抜去することができる。
- 終了後、感染・汚染に注意しながら、本品を鼻から取り外し、安全に廃棄する。

#### 【使用上の注意】

##### ＜重要な基本的注意＞

- 本品に潤滑剤を塗布する際は、潤滑剤で本品の内腔が詰まったり、膜ができていないことを確認すること。  
[潤滑剤により、チューブ内腔が閉塞し、部分的あるいは完全に換気が阻害されるおそれがあるため。]
- 適切な換気を行うこと。[本品内腔の分泌物の凝固を最小限にし、気管粘膜損傷を防ぐため。]
- 定期的にサクションを行い、本品内腔を開放状態に保つこと。  
気道確保の状況を定期的に確認し、必要に応じて交換すること。
- 本品と共に他の製品を使用する場合は、製品の添付文書又は取扱説明書を必ず読み、その指示に従って使用すること。

##### ＜併用注意＞

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
レーザー治療器 電気手術器	本品を介して高濃度酸素を投与している場合は、本品の使用部位の近傍でレーザー治療器(レーザーメス)や電気手術器(電気メス)を原則として使用しないこと。	酸素中でレーザー治療器(レーザーメス)・電気手術器(電気メス)を使用すると突然発火したり、発火による気道熱傷等の恐れや有毒ガス発生の可能性がある。

##### ＜不具合・有害事象＞

###### 1) 不具合

チューブの閉塞、狭窄、潰れ、キック、破損

###### 2) 有害事象

本品の仕様に伴い、以下の有害事象が生じる可能性があるため、患者の状態を十分に観察し、異常が生じた場合は直ちに使用をやめ、適切な措置を施すこと。

- ・鼻腔、咽喉の粘膜損傷や出血等
- ・喉頭痙攣の誘発等

##### 【保管方法及び有効期間等】

###### ＜保管方法＞

- ・水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて室温で保管すること。

###### ＜使用期間＞

- ・製品の外箱の使用期限欄を参照すること

##### 【主要文献及び文献請求先】

株式会社 フジメディカル

TEL:03-3356-8377

##### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

###### 製造販売業者:

株式会社 フジメディカル

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL:03-3356-8377

###### 外国製造業者:

パシフィックホスピタルサプライ社

Pacific Hospital Supply Co., LTD.

台湾