

**2018年1月改訂（第7版）
*2017年7月改訂（第6版）（新記載要領に基づく改訂）

器 84 前各号に掲げる物の附属品で、厚生労働省令で定めるもの
管理医療機器 麻酔用マスク JMDN: 35176000

ソフトフェイスマスク

再使用禁止

【禁忌・禁止】
〈使用方法〉
再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

本品は、患者の鼻と口を覆う麻酔用マスクで、クッション圧が調整可能なバルブが付属している。
本品は、ポリ塩化ビニル（フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）を含まない）を使用している。



品番	品種	包装
FJ1015	新生児用	10 個/箱
FJ1025	乳児用	10 個/箱
FJ1035	幼児用	10 個/箱
FJ1045	成人用 S/小児用	10 個/箱
FJ1055	成人用 M	10 個/箱

【使用目的又は効果】

気道に麻酔ガスを供給するために用いる。

【使用方法等】

1. 顔面にしっかりとフィットさせるように装着する。
2. 必要に応じて、シリンジをバルブに取り付けてマスククッション部のエア一量の調整を行う
3. 本品と麻酔回路又は呼吸回路を確実に接続する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 使用前に漏れや閉塞が無いことを確認すること。
2. 使用中は閉塞を起こさないように常に監視すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて室温で保管すること。

〈有効期間〉

製品の外箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証（自社データ）による]

【主要文献及び文献請求先】

株式会社フジメディカル
TEL：03-3356-8377

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
株式会社 フジメディカル
〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
TEL: 03-3356-8377

外国製造業者：

パシフィックホスピタルサプライ社
Pacific Hospital Supply CO., LTD.
台湾


株式会社フジメディカル