

器05 麻酔器並びに麻酔器用呼吸囊及びガス吸収かん
管理医療機器 単回使用麻酔用呼吸回路バッグ JMDN コード: 34877000

再使用禁止

呼吸バッグLPF

【警告】


・本品を他の製品と接続する場合は、接続部が確実に接続されていること、閉塞やリーク等生じていないことを、接続時及び使用時に確認すること。

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

* 1. 形状

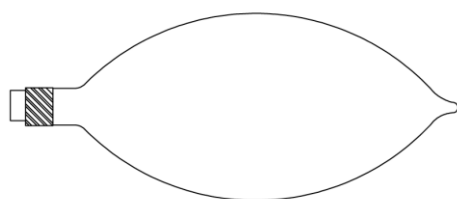

シリーズ番号	ガス容量	入数
FJ3525-20	0.5 L	20 個
FJ3521-20	1.0 L	20 個
FJ3522-20	2.0 L	20 個
FJ3523-20	3.0 L	20 個

【使用目的又は効果】

呼吸回路の設計により回路の吸気側又は呼気側に接続して使用し、呼吸回路中において呼吸ガスを保存すること。

【使用方法等】

1. 患者に合わせ本品を選択する。
2. 本品を呼吸回路のコネクタに接続する。
3. 本品を加圧する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 可燃性麻酔薬の近くでは使用しないこと。
2. 使用中は常に患者の状態及び本品の観察を行い、異常が無いことを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて室温で保管すること。

＜有効期間＞

製品の外箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(自社データ)による]

【主要文献及び文献請求先】

株式会社フジメディカル
TEL : 03-3356-8377

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

株式会社フジメディカル
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
TEL: 03-3356-8377

外国製造業者:

エヴィオン メディカル社
Avion Medical Sp.zo.o.(ポーランド)

 FUJI MEDICAL
CORPORATION
株式会社フジメディカル