

器05 麻酔器並びに麻酔器用呼吸囊及びガス吸収かん
管理医療機器 単回使用麻酔用呼吸回路 JMDN: 37704000
(単回使用呼吸回路用コネクタ JMDN: 34838012)

再使用禁止

麻酔回路

【警告】

・本品を他の製品と接続する場合は、接続部が確実に接続されていること、閉塞やリーク等生じていないことを、接続時及び使用時に確認すること。


【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状


○スタンダード成人用: FJ601000-1
呼吸管長さ: 1500mm

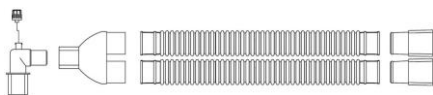


○スタンダード小児用: FJ601400-1
呼吸管長さ: 1500mm




○エクспанダブル成人用: FJ72F1200
呼吸管長さ: 400~1800mm

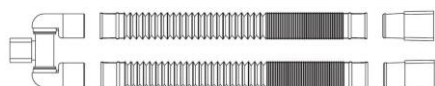

○エクспанダブル小児用: FJ60F1400-1
呼吸管長さ: 500~1500mm

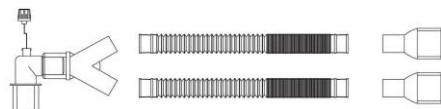

○コアキシャル: FJ61500
呼吸管長さ: 1500mm

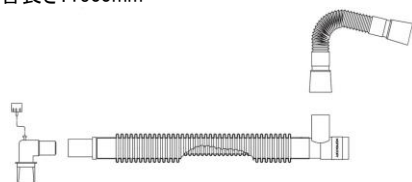

【使用目的、効能又は効果】

人工呼吸器又は麻酔器から患者への空気又は酸素を含むガスの送込に用いること。

【使用方法等】

1. 患者に合わせ本品を選択する。
2. 気管内チューブ等とコネクタを接続する。
3. 人工呼吸器、麻酔システムの呼気側等とコネクタを接続する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- **1. 使用前にサンプリングポートのキャップが確実に閉まっていることを確認してから使用すること。
- 2. 可燃性麻酔薬の近くでは使用しないこと。
- 3. 使用中は常に患者の状態及び本品の観察を行い、異常が無いことを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて室温で保管すること。

<有効期間>

製品の外箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(自社データ)による]

【主要文献及び文献請求先】

株式会社フジメディカル
TEL: 03-3356-8377

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:
株式会社フジメディカル
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
TEL: 03-3356-8377

外国製造業者:
エヴィオン メディカル社
Avion Medical Sp.zo.o.(ポーランド)

FUJI MEDICAL CORPORATION
株式会社 **フジメディカル**