

トラキライフⅡ

再使用禁止

【警告】
（使用方法）
*1. 本品を接続する際は、各接続部が気密かつ確実に接続されていることを確認し、更に接続部におけるリーク及び閉塞がないことを確認すること。[適切な呼吸管理が行えない恐れがある。]
2. 分泌物が溜まった時は、直ちに本品を交換すること。[分泌物過多の患者でない場合も本品に患者の分泌物が付着することにより、流路抵抗の上昇、あるいは閉塞の可能性が有る。]

禁忌・禁止】
再使用禁止
「適用対象患者」
1. 【形状・構造及び原理等】欄に記載される適応一回換気量の範囲外の患者には本品を使用しないこと。[適切な換気が行えない恐れがある。]
2. 分泌物の高いまたは量の多い患者には使用しないこと。[流路抵抗の上昇、あるいは閉塞の可能性が有る。]
「併用医療機器」
1. 加温加湿器およびネブライザーと併用しないこと。[流路抵抗の上昇、および閉塞により換気が行えない恐れがある。]
「使用方法」
1. 本品を 24 時間を超えて使用しないこと。


【形状・構造及び原理等】

＜形状・構造＞
**本品はエチレンオキシドガスによる滅菌品である。また、本品を収納して用いられる付属品がある。（付属品は未滅菌）

FJ-302



付属品/FJ-1161-1

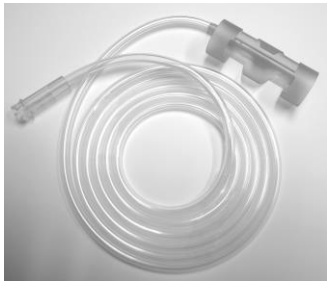

FJ-1168 吸引バルブ・酸素ポート付



＜適応換気量及び死腔量等＞

型式	死腔量	流量抵抗	1 回換気量
FJ-302	12. 5mL	0. 32cmH ₂ O 30L/min	100-1, 000mL
FJ-1168	12mL	0. 40cmH ₂ O 30L/min	100-1, 000mL

＜作動・動作原理＞

本品は気管切開患者用の人工鼻で気管切開チューブに接続して使用する。本品を専用の付属品と組み合わせて使用出来る。

【使用目的又は効果】

患者の人工気道に沿って接続した場合等に、患者の呼気の熱と水分を捕捉し、これらを利用して呼気ガスを加湿及び加温する、受動的なキャニスタ型の気管切開用人工鼻で、器械側ポートが無く、自発呼吸のある気管切開患者に使用する。

【使用方法等】

＜使用方法＞

1. FJ-302
1) 包装及び製品に破損、異常が無いことを確認し、製品をとりだす。
2) 付属品を使用する場合、FJ-302 を付属品のアダプタ部にセットする。
3) 本品をセットした付属品と酸素供給ラインを接続する。
4) 本品接続部を気管切開チューブに接続する。
5) 全ての接続箇所にてリーク及び閉塞が無いことを確認する。

＜使用方法＞

2. FJ-1168
1) 包装及び製品に破損、異常が無いことを確認し、製品をとりだす。
2) 本品を気管切開チューブ、又は気管チューブに接続する。
3) 酸素を供給する場合は、酸素ポートに酸素供給チューブを接続する。
4) 分泌物等を吸引する場合は、吸引バルブから吸引カテーテルを挿入する。
5) 全ての接続箇所にてリーク及び閉塞が無いことを確認する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 自発呼吸のある気管切開患者に接続すること。
- 2) 使用前、使用開始時に全ての接続箇所にてリーク及び閉塞がないことを確認すること。
- 3) 患者の分泌物が本品に付着し、流量抵抗が上昇した場合は必ず新しいものと交換すること。
- 4) 常に患者の状態および本品のモニターを行い、流量抵抗を確認すること。
- 5) 不具合が発生した場合、本品を取り外すか新品と交換し、適切な気道確保措置を行うこと。
- 6) 本品を着脱する際、本品に無理な力が加わり、リーク・閉塞等が発生することのないよう、十分に注意すること。

＜併用禁忌＞（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置法方法	機序・危険因子
加温加湿器またはネブライザー	流路抵抗の上昇、及び閉塞	換気が行えない恐れがある。

＜併用注意＞（併用に注意すること）

本品と併用する医療機器に関しては、その医療機器の添付文書を参照すること。
・閉鎖式吸引システムを併用する場合は、過剰の洗浄液が本品の内部に流入し、流量抵抗が上昇する可能性があるため注意すること。
・他のコネクタ等、本品の付属品以外の機器を併用する場合には流量抵抗の増加または漏れが発生し、適切な換気ができない可能性があるため、流量抵抗の増加およびリークに留意すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

高温、多湿、直射日光、水漏れのある場所を避け、室温で保管すること。

＜使用期間＞

24 時間以上使用しないこと。

＜有効期間＞

製品包装の使用期限欄を参照のこと[自己認証(当社データ)による]。

【主要文献及び文献請求先】

株式会社フジメディカル

TEL : 03-3356-8377

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者

株式会社フジメディカル

東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL 03-3356-8377

外国製造業者

グレートグループメディカル社

(Great Group Medical Co.,Ltd.)

台湾(Taiwan R.O.C.)



株式会社 **フジメディカル**