

器 1 2 理学診療用器具
管理医療機器 人体開口部用超音波プローブカバー JMDN: 70015000
(術中用超音波プローブカバー JMDN: 70016000 *体表面用超音波プローブカバー JMDN: 70014000)

エコープローブカバーⅡ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞


1. 再使用禁止。
- *2. 中心循環系又は硬膜を含む中枢神経系には使用しないこと。
[当該部位での使用は意図していない。]

【形状・構造及び原理等】

本品は、プローブ先端部及びケーブルを保護するプローブカバーとそれを束ねるゴムバンド及び注入用のジェル、ドレープからなる。

(一部の構成部品が含まれない場合もある。)

プローブカバー（伸長時）

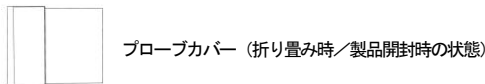

ゴムバンド



ジェル



ドレープ（開封時プローブカバー等が梱包されている不織布）



- ・プローブカバーのサイズは製品によって異なります。
- ・ゴムバンドの数量は製品により数量が異なります。

経食道用プローブカバー

インサーター付プローブカバー（伸長時）（テープ 2 枚付、1 枚予備）



ジェル



ドレープ（開封時プローブカバー等が梱包されている不織布）



プローブカバー原材料：ポリエーテルポリウレタン

品番	仕様	包装
P09150	全長 150cm 先端面 75x50mm/挿入口 13cm 幅	24 セット/箱
P09150W	全長 150cm 先端面 100x50mm/挿入口 15cm 幅	24 セット/箱
P09250	全長 250cm 先端面 75x50mm/挿入口 13cm 幅	12 セット/箱
P09020	全長 20cm 先端面 75x50mm/挿入口 13cm 幅	24 セット/箱

経食道用プローブカバー

品番	仕様	包装
PE0026	経食道用 大 全長 122cm 先端全周 45mm	12 セット/箱
PE0025	経食道用 小 全長 122cm 先端全周 33mm	12 セット/箱

**【使用目的又は効果】

超音波プローブに装着し、体液等から保護するために用いる。本品は単回使用である。

*【使用方法等】

※ 本品には各種サイズがあります。プローブの大きさに適切なサイズをご使用下さい。

1. 平らな机等の上で滅菌バッグを開封し、内側のドレープからプローブカバーを取り出します。

2. プローブカバーが折りたたまれた状態で、開口部から内部にジェルを適量注入します。（ジェルが含まれている場合）



3. プローブ先端部をプローブカバー内部に装着します。この時プローブとプローブカバーの間のエア抜き及び、皺取りを行って下さい。



4. プローブカバー開口部を引っ張るようにのばし、プローブ及びケーブルをプローブカバーで覆い、ゴムバンドでプローブカバーを固定して下さい。



5. 必要に応じてゴムバンドを追加して固定して下さい。



6. 使用後は装着と逆の手順でプローブカバーを外し、施設の基準に従い廃棄して下さい。プローブの洗浄は装置の使用法に従って下さい。

経食道用プローブカバー

1. 滅菌バッグ及び内側のドレープからプローブカバーが装着されたインサーターを取り出します。




2. プローブカバー内側、プローブ面にジェルを適量付けます。



3. プローブをインサーターを介して
プローブカバー内部に装着します。
この時プローブとプローブカバー表面の
エア抜き及び皺取りを行って下さい。

4. 繋ぎ目がレンズの邪魔に
ならないようにカバーの位置を
調節します。

5. テープライナーを取り除き、
インサーターをプローブに固定
します。

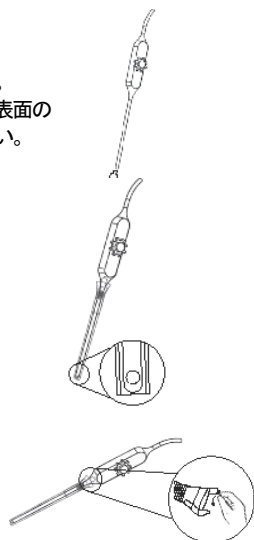

6. 使用後は装着と逆の手順でプローブカバーを外し、施設の基準に従
い廃棄して下さい。
プローブの洗浄は装置の使用方法に従って下さい。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・プローブより小さなサイズの本品を使用しないこと。[破損の恐れがある。]
- ・本品の滅菌ジェルは、【操作方法、使用方法等】に記載の方法に従い、プローブとプローブカバーの間に入れて使用し、それ以外の方法では使用しないこと。[滅菌ジェルの粘膜及び体液等との接触は意図されていないため。]
- ・本品は EOG 滅菌済みにつき開封後 1 回限りの使用です。再滅菌・再使用しないでください。
- ・使用前に破損等が無いことを確認して下さい。
- ・超音波画像診断装置等の使用方法・使用上の注意に従って使用して下さい。
- ・ゴムバンドはしっかりと固定して下さい。
- ・ジェルは適量使用して下さい。[使用量が少ないと画像が不鮮明になる恐れがある。]
- ・本品のプローブへの装着は、付属のドレープの上で行って下さい。
- ・本品のドレープを治療行為に使用しないで下さい。[準備作業時に本品及び、プローブ等を清潔に保つものである。]

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて室温で保管して下さい。

＜有効期間＞

製品の外箱の使用期限欄を参照して下さい。[自己認証（自社データ）による]

【主要文献及び文献請求先】

株式会社フジメディカル
TEL : 03-3356-8377

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社 フジメディカル
〒160-0004
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
TEL : 03-3356-8377

外国製造業者： Pacific Hospital Supply Co., LTD.
(パシフィックホスピタルサプライ社) 台湾

