

歯科材料09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ 35768000

## STODDARDジュニアカップブラシ


### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

形状・構造：〔形状〕 ブラシ付カップ  
〔規格〕 RA・CA用  
〔寸法〕 全長：28.0mm±0.5  
作業部：長さ4.9mm±0.2  
直径7.0mm±0.5

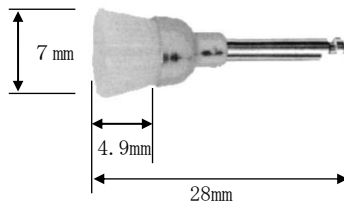

原材料：毛 / 豚毛  
カップ/真鍮（ニッケルメッキ）  
軸部/真鍮（ニッケルメッキ）  
原理：ブラシを備えた回転式歯科用器具である。

#### 【使用目的又は効果】

歯の清掃と研磨に用いることに使用する。

#### 【使用方法等】

歯科用電気エンジン等で、研磨を行う。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ① 本材がしっかりとハンドピース（RA/CA用）内でロックされているか確認すること。
- ② 装着後、使用機器メーカー及び本材に指定（回転数等）されている指示に従い使用すること。
- ③ 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- ④ 本材が破損する恐れがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用はさけること。
- ⑤ 脱着は完全にモーターの回転が止まった事を確認してから行うこと。

#### 【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ① 指定の最高回転を超えて使用しないこと。  
（最高回転数：10,000rpm 推奨回転数：3,000rpm）
- ② 損傷及び変形（曲がり、汚損等）したものは、使用しないこと。
- ③ 感染もしくは怪我の防止のために、ゴーグル等の保護具を使用すること。
- ④ 単回使用とすること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 化学薬品及び錆びている器具と一緒に保管しないこと。
- ・ 高温・多湿・直射日光及び水濡れを避けて清潔な場所に保管すること。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 プロデント  
TEL：06-6957-1000  
<http://www.prodent.jp/>

製造業者：スタッダード マニファクチャリング  
カンパニー リミテッド  
STODDARD MANUFACTURING COMPANY LTD.  
（英国）