
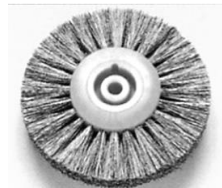


歯科材料09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

## エレファント レーズブラシ 148P

### 【形状・構造及び原理等】

形 状：円形状  
構 造：四列の植毛部を持つホイール  
原材料：毛 / 山羊毛（ソフト）  
ホイール / ポリエチレン  
止 金 / 鉄ワイヤ（亜鉛鍍金）  
原 理：歯科技工用電気レーズ等の動力が本材に伝達し、  
植毛部にて研磨をする。  
寸 法：外 寸：直径 80mm  
ホイール：直径 40mm

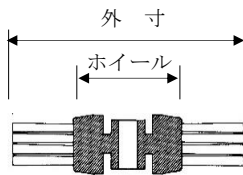

### 【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ① 指定の使用回転数（2,000～2,800rpm）を厳守すること。
- ② 損傷・変形・汚損等したものは、使用しないこと。
- ③ 怪我の防止のために、ゴーグル等の保護具を使用すること。
- ④ 粉塵による人体への影響を避けるため、局所集塵装置、防塵マスク等を使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・ 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避け、清潔な場所に保管すること。
- ・ 直射日光や振動の激しい場所での保管は避けること。

### 【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材である。

### 【使用方法等】

歯科技工用電気レーズ等で、研磨を行う。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ① 歯科技工用電気レーズのバフ用金具に確実に装着されているか確認すること。
- ② 装着後、使用機器メーカー及び本材に指定（回転数等）されている指示に従い使用すること。
- ③ 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- ④ 本材が破損する恐れがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用はさけること。
- ⑤ 脱着は完全にモーターの回転が止まった事を確認してから行うこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 プロデント

TEL：06-6957-1000

<http://www.prodent.jp/>

製 造 業 者：スタッダード マニファクチャリング  
カンパニー リミテッド

STODDARD MANUFACTURING COMPANY LTD.  
（英国）