



類別： 医 04 整形用品  
一般医療機器 救急絆創膏 JMDN:34864000  
販売名： チェストシール

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状



#### 2. 原材料

表面：ポリウレタン  
粘着面：ハイドロジェル  
クリアライナー：ポリエステル

### 【使用目的又は効果】

身体の部位に用いる、粘着剤を付した布製、プラスチック製等の各種形状の絆創膏材をいう。パッドを付する場合もある。傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

### 【使用方法等】

- (1) 傷口の周りをきれいにする。
- (2) グリップタブを開き、クリアライナーを取り外す。
- (3) 粘着面を下にして傷の上に置く。
- (4) 皮膚にしっかりと押し込んで密閉する。

### 【使用上の注意】

重要な基本的注意

- (1) 包装が破損したもの、開封済みのもの、または水濡れしたものは使用しないこと。
- (2) 破損の原因となるため、本品をカッター、ナイフ、ハサミ等で傷つけないこと。
- (3) 開封後はすみやかに使用すること。
- (4) 肌に発疹、かゆみ等の異常があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、適切な治療を行なうこと。
- (5) 本品は十分にトレーニングを受けた者が使用すること。
- \* (6) 単回使用の製品のため、使用後は医療用廃棄物として適切な廃棄をすること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

\*\*水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて清潔な場所に保管すること。

#### 2. 使用期限

パッケージに記載

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社フジタ医科器械  
郵便番号：113-0033  
住 所：東京都文京区本郷3-6-1  
電話番号：03-3815-8810（代）

外国製造業者：Pepin Manufacturing, Inc.（米国）