



チェストシール

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

**1. 形状(代表的形状)

**

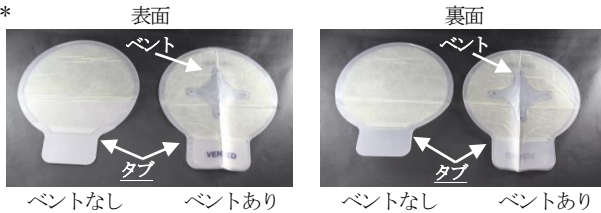

【製造販売者又は製造者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売者：株式会社フジタ医科器械
郵便番号：113-0033
住所：東京都文京区本郷三丁目6番1号
電話番号：03-3815-8810（代）

**外国製造業者：BEACON MEDICAL, LLC

2. 原材料

**表面、タブ：ポリウレタン
粘着面：ハイドロジェル
クリアライナー：ポリエステル

**3. 原理

身体の一部に用いる粘着剤を付した絆創膏材である。ベント付きは、
ベント部より排気する。

【使用目的又は効果】

身体の一部に用いる、粘着剤を付した布製、プラスチック製等の各種
形状の絆創膏材をいう。パッドを付する場合もある。傷の被覆及び保
護、傷口の皮膚接合、身体の一部の支持等に用いる。

【使用方法等】

- **・傷口の周囲を清潔にする。
- **・タブをつまみ、クリアライナーを取り外す。
- **・粘着面を下にして傷の中央に張り付ける。
- **・皮膚にしっかりと押し付け密閉する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- **・使用前に使用期限内であることを確認すること。
 - ・包装が破損したもの、開封済みのもの、または水濡れしたものは使用しないこと。
 - ・破損の原因となるため、本品をカッター、ナイフ、ハサミ等で傷つけないこと。
 - ・開封後はすみやかに使用すること。
 - ・肌に発疹、かゆみ等の異常があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、適切な治療を行なうこと。
 - ・本品は十分にトレーニングを受けた者が使用すること。
- *・単回使用の製品のため、使用後は医療用廃棄物として適切な廃棄をすること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- **・水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて清潔な場所で、
常温にて保管すること。

2. 使用期限

- ・パッケージに記載