



類別: 医05 副木
一般医療機器 単回使用パッド入り副木 JMDN:35357000
販売名: ネックライト

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【保管方法及び有効期間等】

** (1) 水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて清潔な場所に保管すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状(代表的形状)



【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社フジタ医科器械
郵便番号: 113-0033
住所: 東京都文京区本郷3-6-1
電話番号: 03-3815-8810 (代)

外国製造業者 FLAMOR S.r.l (イタリア)

*2. 原材料

ポリエチレン、アルミニウム

【使用目的又は効果】

頸部を素早く固定し、搬送時の損傷拡大を防止する。

【使用方法等】

- (1) 後辺の通気孔部分を患者の首の後ろにスライドさせ反対側まで通す。
- (2) 患者の顎の下に気管切開孔が来るように調整し前辺を下顎に巻きつける。
- (3) ベルクロストラップを使用してカラーを患者の首にしっかりと固定する。
- (4) 調整翼に顎を付けて固定されていることを確認する。
- (5) 必要に応じて、カラーを患者の頸部固定する位置に調整し、ベルクロストラップを再調整する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- (1) サイズの合わないものは使用しないこと。
- (2) 破損・剥がれのないことを確認してから使用すること。
- ** (3) 肌に発疹、かゆみ等の異常があらわれた場合は直ちに使用を中止し、適切な治療を行なうこと。
- (4) 本品が破損した場合にはただちに使用を中止すること。
- ** (5) 単回使用の製品のため、使用後は適切な廃棄をすること。