



類別：器 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ JMDN：70469000

スクリーン架

【警告】


- ・アクセサリの不完全な取付けは、患者に傷害をおよぼすおそれがある。取付け後は必ず正しく確実に固定されていることを確認すること。[患者に対して受傷の原因となる可能性がある。]

【禁忌・禁止】

- ・本製品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）することは、折損等の原因となるので絶対に行わないこと。[破損などの原因となる。]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状(代表的形状)

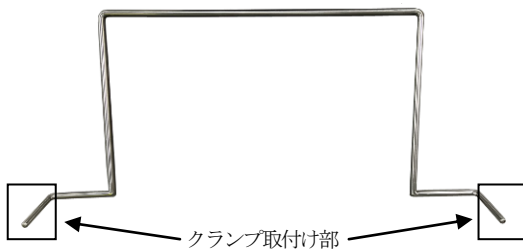

2. 原材料

ステンレス

3. 動作原理

クランプを用いて手術台等に固定する。

【使用目的又は効果】

手術台にクランプを用いて固定し使用するスクリーン掛である。

【使用方法等】

- ・市販のクランプをサイドレールに仮固定する。クランプの取扱いは製品の附属文書に従うこと。
- ・本品のクランプ取付け部をクランプに差し込む。
- ・本品の位置を調整し、クランプで固定する。固定が十分か必ず確認を行うこと。
- ・使用後は、【保守・点検に係る事項】に則り取り扱うこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・本品を使用する際は、本品に血液・体液等が付着しないように十分に注意すること。

- ・本品が確実に固定されていることを確認すること。確実に固定されていない状態で使用すると、機器が動いたり、落下したりするなど事故の原因となる。
- ・手術台の動作や移動の際は、本品が患者や手術台の部位または室内の他の物品と衝突する可能性がある事に注意を払うこと。
- ・高周波機器、除細動器あるいは除細動モニター使用時に、機器の金属部分の露出および接触により、患者熱傷の恐れがある。また、患者を湿ったドレープや導電性パッドの上に寝かせている場合も同様の恐れがある。患者と金属部分の接触を避け、水分を含んだドレープなどは使用しないこと。必ず使用する機器の取扱説明書に従うこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・完全に乾燥させてから保管すること。
- ・高温、多湿、水濡れ、直射日光、火気の近くを避けること。
- ・温度や湿度の極端に変化する場所を避けること。
- ・塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。
- ・変形や損傷の原因となりうる場所へは保管しないこと。

＜耐用期間＞

耐用期間：3年間[自己認証(当社データ)による]

ただし、使用状況や取り扱い方法によっては、3年未満で使用できなくなる場合がある。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前・使用後の点検

- ・変形、傷や破損箇所などの異常がないことを確認すること。

2. 清掃・消毒

- ・血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコールガーゼで清拭すること。
- ・薬液等が付着した状態で放置しないこと。
- ・金属たわし、磨き粉（クレンザー等）の類は使用しないこと。

3. 故障時のお願い

- * 本品が故障したと思われるときは、清掃・消毒を行なった後に、本品に「故障」、「使用中止」、「要修理」等の適切な表示を行^つたうえで、清掃・消毒済みがわかるような表示を行い、納入業者又は弊社にご連絡ください。

＜業者による保守点検＞

- ・本品を安全に使用するために、弊社による定期点検を実施し

てください。それ以外の業者による保守点検は、有害事象の発生、性能・機能低下を招くおそれがあります。定期点検をご希望される場合は、弊社または納入業者にお問い合わせください。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者： 株式会社フジタ医科器械
郵便番号： 113-0033
住 所： 東京都文京区本郷 3-6-1
電話番号： 03-3815-8810（代）