



透明吸引管

【禁忌・禁止】

- ・本製品を切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）することは、折損等の原因となるので絶対に行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

**1. 形状(代表的形状)



2. 原材料

ポリプロピレン

3. 原理

- **組み立てた状態で吸引器具に接続し吸引を調節又は指示する。

【使用目的又は効果】

- **本品は吸引ノズルである。指定された吸引本体と組み合わせた状態で吸引器具に接続し吸引を調節又は指示する。

【使用方法等】

- **本品は未滅菌製品である。使用する前に必ず点検を行い【保守・点検に係る事項】に従い、洗浄、滅菌を行なうこと。
- **本品は脱着式吸引本体と接続して使用する。本品と組み合わせて使用する吸引本体は以下の製品である。

販売名：手術用吸引管
医療機器製造販売届出番号：13B1X10237SU0002
製造販売業者：株式会社フジタ医科器械

脱着式吸引本体(代表的形状)



**イリゲーション吸引本体(代表的形状)



【使用上の注意】

重要な基本的注意

- *本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
- *本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。
 - ・本品は未滅菌ですので使用前に必ず洗浄・滅菌（保守・点検に係る事項参照）すること。
 - ・使用前に正常であることを確認してから使用すること。
 - ・使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
- **他社製の再使用可能な汎用吸引チップと組み合わせて使用しないこと。

- **本品と組み合わせて使用する吸引本体と本品の嵌合部に過度な力が加わると、本品が抜けたり、破損する恐れがあるので注意すること。
 - ・使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- **塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、破損の原因になるので使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。

【保管方法及び有効期間等】

- **貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥をすること。
 - ・滅菌済のものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管をするとともに、有効保管期間の管理をすること。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。
- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- ・洗浄は手洗いを推奨する。包装や保管するときは、完全に乾かす。
- ・洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。仕上げすすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いること。
- ・洗浄後は、直ちに乾燥すること。
- ・滅菌前に、汚れ、傷、曲がり等の異常がないか点検をすること。
- ・点検後、セット・包装をし、滅菌すること。
- **金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので汚染除去及び洗浄時の使用しないこと。
- **本品は未滅菌です。使用前に必ず EOG 滅菌を行うこと。（高圧蒸気滅菌など、EOG 滅菌以外の滅菌方法は対応しない。）使用に際しては必ず洗浄し、適切に機能することが確認された EOG 滅菌器による標準的滅菌条件又は、医療機関で滅菌バリテーションが検証され、有効性が立証された滅菌条件により滅菌を行なうこと。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社フジタ医科器械
郵便番号：113-0033
住所：東京都文京区本郷三丁目 6 番 1 号
電話番号：03-3815-8810（代）