



類別: 器 29 電気手術器
一般医療機器 単回使用電極クリーナー JMDN:70654000
販売名: ティップクリーナー

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- ・再使用禁止

***【形状・構造及び原理等】**

1. 形状



サイズ 48mm×48mm

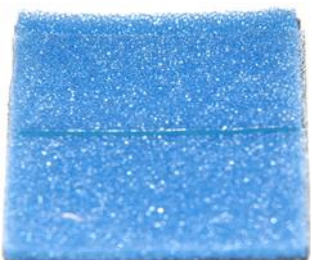

X線不透過ライン

2. 原材料

フォーム部分: ポリエステル、ポリウレタン

やすり部分: 酸化アルミニウム

X線不透過ライン: バリウム

【使用目的又は効果】

アクティブ電極を使用した際、電極に付着した炭化物等の除去を目的とした単回使用クリーナー。

【使用方法等】

メス先をヤスリ部分に接触させ、擦るようにして異物の除去を行う。異物の除去後はメスならびにピンセット先を消毒用アルコールにて清拭すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

(1)本品は使用する前に、異状がないか確認すること。もし異常があれば使用せず廃棄すること。

*(2) 使用後は医療用廃棄物として適切な廃棄をすること。

(3)包装が破損したり、汚染した場合は廃棄すること。

(4)開封した場合、使用しなかったものも廃棄すること。

(5)使用にあたっては、電気メス、バイポーラピンセット等の添付文書や取扱説明書を参照すること。

【保管方法及び有効期間等】

*(1)高温、多湿、直射日光および水濡れを避けて清潔な場所で保管すること。

(2)包装材料を傷つけたり、ピンホールを生じさせないように取り扱うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社フジタ医科器械

郵便番号: 113-0033

住 所: 東京都文京区本郷 3-6-1

電話番号: 03-3815-8810 (代)

外国製造業者 Aspen Surgical Products Inc. (米国)