



類別： 医 04 整形用品

一般医療機器 単回使用クラス I 処置キット JMDN:33961001

TRAUMA キット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・外観



2. 構成品

一般医療機器

構成品名称

一般的名称

- | | |
|----------|----------------|
| ①ターニケット | 再使用可能な止血帯 |
| ②バンデージ | 医療用不織布 |
| ③チェストシール | 救急絆創膏（ベント付き） |
| ④グローブ | 非天然ゴム製検査・検診用手袋 |
| 付属品 | |
| ⑤マスク | |
| ⑥ブランケット | |

3. 原材料

名称

原材料

- | | |
|----------|---|
| ①ターニケット | ナイロン、アセタール形成品、
アルミニウム、ステンレス、
プラスチック |
| ②バンデージ | 綿 |
| ③チェストシール | ポリウレタン、ハイドロジェル、
ポリエステル |
| ④グローブ | ニトリル |

【使用目的又は効果】

一般的な処置を行うために必要なクラス I の各種器具、被覆保護材及び医薬品の全てを含む、ブレパッケージされたキットをいう。本品は単回使用である。

【使用方法等】

ターニケット

- (1) 創傷部の上腕又は上肢にターニケットを装着する。

* (2) 出血が止まるまでロッドを回して固定する。

バンデージ

- (1) パッドを傷部の上に置く。
- (2) 包帯を巻いて固定する。

チェストシール

- (1) グリップタブを開き、クリアライナーを取り外す。
- (2) 粘着面を下にして傷の上に置く。
- (3) 皮膚にしっかりと押し込んで密閉する。

グローブ

- (1) グローブを取り出して装着する。

マスク

- (1) マスクを取り出して装着する。

ブランケット

- (1) ブランケットを取り出して使用する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- (1) 包装が破損したもの、開封済みのもの又は水濡れしたものは使用しないこと。
 - (2) 破損の原因となるため、本品をカッター、ナイフ、ハサミ等で傷つけないこと。
 - (3) 開封後はすみやかに使用すること。
 - (4) 再滅菌をしないこと。
 - (5) 本品を使用中、創傷部に感染が発生した場合は、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- * (6) 単回使用の製品のため、使用後は医療用廃棄物として適切な廃棄をすること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

* 水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて清潔な場所に保管すること。

2. 使用期限

包材に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社フジタ医科器械

郵便番号：113-0033

住 所：東京都文京区本郷 3-6-1

電話番号：03-3815-8810（代）

**外国製造業者：TACMED SOLUTIONS, LLC（米国）

外国製造業者：Pepin Manufacturing, Inc.（米国）