



類別：医04 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 JMDN：34655000
MODULAR バンデージ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・本品を体内に留置しないこと。
- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

*1. 形状・構造・外観

OLAES MODULAR BANDAGE



BLAST BANDAGE



OLAES Hemostatic Bandage



*2. 原材料

名称	原材料
包帯、ガーゼパッド、パッド、止血ガーゼ	綿、ポリアミド、ポリエステル、ポリエチレン、レーヨン
プラスチッククリップ	ABS樹脂
透明プラスチックカップ	ABS樹脂

【使用目的又は効果】

創傷の被覆及び保護、出血の抑制、創傷部位の固定等に用いる。

【使用方法等】

- (1) パッドを使用して、パッドを損傷部位に直接置く。
ガーゼパッドを使用する場合はパッドを開いて傷口をガーゼパッドで覆う。
- (2) 包帯をしっかりと巻く。
- (3) 包帯をプラスチッククリップで固定する。

【使用上の注意】

- (1) 包装が破損したもの、開封済みのもの又は水濡れしたものは使用しないこと。
- (2) 破損の原因となるため、本品をカッター、ナイフ、ハサミ等で傷つけないこと。
- (3) 開封後はすみやかに使用すること。
- (4) 再滅菌はしないこと。
- (5) 本品を使用中、創傷部に感染が発生した場合は、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- (6) 本品の使用中に濡れたり、汚染した場合には、直ちに新しいものと交換すること。
- (7) 単回使用の製品のため、使用後は医療用廃棄物として適切な廃棄をすること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて清潔な場所に保管すること。
2. 有効期間
製造後5年間
3. 使用期限
包材に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社フジタ医科器械

郵便番号：113-0033

住 所：東京都文京区本郷3-6-1

電話番号：03-3815-8810 (代)

**外国製造業者：TACMED SOLUTIONS, LLC (米国)