

類別： 医05 副木

一般的名称： 成形型副木

JMDNコード： 35354000

クラス分類： クラスⅠ 一般医療機器

サムスプリント モデル SP1121

【警告】

- 1 実際に使用する前に、取扱方法を十分に習得して下さい。
- 2 使用法を習得した人意外は使用しないで下さい。
- 3 装着する際は、傷病者の安全を確保するために、2人以上で行って下さい。

【禁忌・禁止】

- 1 本体は繰り返し使用できますが、内部のアルミニウム板が露出した時は、危険ですので使用を中止して下さい。

【形状・構造及び原理等】



- 1 外側：軟質ウレタンフォーム 2 内部：アルミニウム板

本体を負傷部位の形に変形させ患部を固定するために使用します。

【使用目的又は効果】

- 1 使用目的 負傷部位を固定するために使用します。
- 2 効能又は効果 負傷部位を固定する事で、二次障害を防止します。

【品目仕様】

- 1 本体は水道水等で洗浄可能で再使用できます。
- 2 装着したまま、レントゲン撮影が可能です。

【使用方法等】

- 1 本体を患部に合わせ、適切な形に整えます。
- 2 患部に合わせます。
- 3 包帯、テープ、タオル等でしっかりと固定します。

【使用上の注意】

- 1 使用法を習得した人意外は使用しないで下さい。
- 2 装着は2人以上で行って下さい。
- 3 本体を装着する時は、傷病者の状態を絶えず確認して下さい。
- 4 装着中は、本体に異常が無い事を絶えず確認して下さい。
- 5 傷病者又は本体に異常が発見された時は、傷病者の安全を確保しながら適切な措置を講じて下さい。
- 6 本体は改造又は分解しないで下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1 常温で保管して下さい。
- 2 化学薬品の保管場所、ガスを発生する場所には保管しないで下さい。
- 3 使用期限はありませんが、内部のアルミニウムが露出した場合は使用を中止して下さい。

【取扱上の注意】

- 1 繰り返しの使用で、内部のアルミニウムが露出した場合には使用を中止し、適切な方法で廃棄して下さい。

【保守・点検に係る事項】

- 1 本体が汚れてしまった場合、水道水等で洗浄が可能です。
- 2 使用の都度、内部のアルミニウムが露出していない事を確認して下さい。

【包装】

1 ロール単位

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

- 1 製造販売業者 ファーノ・ジャパン・インク
東京都千代田区岩本町1-9-5
FKビル 4階
Tel: 03-5820-4649

- 2 製造業者 SAM Medical Products
サムメディカルプロダクツ社
アメリカ合衆国

取扱説明書を必ず参照下さい。