

類別：医療用品03 手術用手袋及び指サック

一般的名称：非天然ゴム製検査・検診用手袋

JMDNコード：70976000

クラス分類：クラスⅠ 一般医療機器

再使用禁止

テクスシールド


【警告】

非天然ゴム製品に対するアレルギーのある方は使用に際し注意して下さい。

【禁忌、禁止】

使い捨て製品につき再使用禁止。

【形状、構造等】

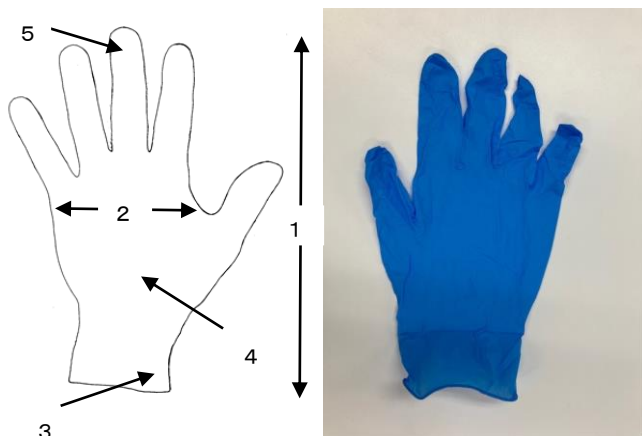

本体(ニトリル合成ゴム)、指先エンボス加工

色:ライトブルー

サイズ	1 全長	2 掌部幅	3 袖口厚	4 掌部厚	5 指先厚
S	240	80±10	0.05	0.06	0.07
M	240	95±10	0.05	0.06	0.07
L	240	110±10	0.05	0.06	0.07
XL	240	120±10	0.05	0.06	0.07

単位：mm

【使用目的、効能又は効果】

- 使用目的 救急現場、医療現場、研究所等で使用する
使い捨ての検査検診用ゴム手袋です。
- 効能又は効果 感染等の防止

【品目仕様】

- 引張強度 老化前 15MPa以上
老化後 14MPa以上

- 切断時伸び 老化前 500%以上
老化後 400%以上

適合規格 ASTM D6319
ASTM D6978
EN 455
CE
食品衛生法

【使用上の注意】

- 本体は使い捨てのゴム手袋なので、再使用は絶対にしないで下さい。
- 使用中に発疹が出る、かゆくなる等の症状が出た時は直ちに使用を中止し、医師の診断を仰ぐ等、適切な処置を講じて下さい。
- 使用後は適切な方法で廃棄処分して下さい。

【貯蔵、保管方法及び使用期限】

- 貯蔵、保管方法 高音多湿を避け、専用箱に入った状態で保管して下さい。
オゾンが発生する場所等に保管しないで下さい。
- 使用期限 製造日より3年

【包装】 1箱(100枚)単位

【輸入販売業者の氏名又は名称及び住所】

- 製造販売者 ファーノ・ジャパン・インク
東京都千代田区岩本町1-9-5
FKビル 4階
Tel:03-5820-4649
- 製造業者 MAH SING HEALTHCARE SDN. BHD.
マーシン ヘルスケア
マレーシア

取扱説明書を必ず参照下さい。