

類別：医療用品01 手術台及び治療台

一般的名称：手術台アクセサリ

JMDNコード：70469000

クラス分類：クラスI 一般医療機器

ポジショニングマットレス

【禁忌、禁止】

(併用医療機器)

患者加温装置を本製品と患者の間、又は本製品と手術台・治療台の間に入れて併称しないでください。

【形状、構造等】



ポジショニングマットレス本体 代表サイズ(色：青・白)

サイズ・モデル

商品コード (青/白)	全長 mm	幅 mm	厚み mm
2239664 / 223966	500	400	100
2239584 / 223958	850	550	100
2239414 / 223941	650	550	100
2239334 / 223933	300	550	100
2239224 / 223922	2000	800	100
2239114 / 223911	1000	800	100



バキュームポンプ(別売・非医療機器)

2. 原材料

PVC ナイロン、プラスチック、ポリスチレン顆粒

3. 原理

柔らかく、強度のあるPVC ナイロン表皮内に大量のポリスチレン顆粒が強力な気密シェルに包まれており、バルブを通して空気を抜く事で内部顆粒間の空気が抜け任意の形状や硬さに成形しその形状を保持する事が出来る。

【使用目的、効能又は効果】

- 1 使用目的 手術台に付属するアクセサリをいう。

【使用方法】

- 1 本体を広げます。
- 2 マットレス全体が均一の厚みになるように伸ばします。
- 3 複数名で安全に患者を本体上にのせ、固めたい形に変形させ保持します。
- 4 バルブに専用ポンプ(別売)を接続し中の空気を抜いていきます。
- 5 希望の形状、硬さになりましたらバルブを閉じ、専用ポンプ(別売)を外します。
- 6 使用後は、バルブを開放し中に空気が入る事で元の形状にもどります。
- 7 元の形状に戻ったら患者を安全に移動させます。

【使用上の注意】

- 1 本製品装着時には、必ず複数名で行ってください。
- 2 使用方法を習得した人以外は使用できません。
- 3 本体に破れ等破損のある物は使用しないでください。
- 4 使用中は、患者の状態を絶えず確認すると同時に、本体に異常が無い事を確認してください。
- 5 本体の改造、分解は禁止です。
- 6 空気の吸引には、専用ポンプ(別売)をご使用下さい。
- 7 使用前に必ず点検を行ってください。
- 8 患者または本体に異常が生じた場合には、患者の安全を確保しながら本体を外し、他の固定方法を選択する等の措置を講じてください。
- 9 術式などにより手術台・治療台に傾斜がついた状態でご使用の場合は、マットが滑り落ちない様、滑り止めシート等併用し安全を確保した状態でご使用下さい。

【貯蔵、保管方法及び使用期限】

1 貯蔵、保管方法

バルブを開放した状態で常温・常湿にて保管下さい。

オゾンが発生する場所等に保管しないで下さい。

2 使用期限

設定なし

【保守・点検に係る事項】

1 洗浄・消毒

使用后、消毒用アルコールで湿らせた清潔で柔らかな布で清拭する。

2 酸性洗剤や有機溶剤等は使用しないでください。

【輸入販売業者の氏名又は名称及び住所】

1 製造販売業者

ファーノ・ジャパン・インク
東京都千代田区岩本町1-9-5
FKビル 4階
Tel:03-5820-4649

2 製造業者

AB GERMA
スウェーデン

取扱説明書を必ずご参照下さい。