

一般医療機器 類別:器 40 医療用のこぎり
 一般的名称:手術用のこぎり (JMDNコード:13448001)

ソーブレード

【禁忌・禁止】

1.本品について、改造や加工等を行わないこと。[形状の変更や刻印をするなどの二次加工は折損の原因となるため]

【形状・構造及び原理等】

1.形状等

本品は骨手術に用いる手術器械である。



原材料:ステンレス鋼
 (ステンレス鋼には、クロム及びニッケルが含まれている。)

2.原理

本品の使用により、適切に骨を切削することができる。

【使用目的又は効果】

本品は再使用可能な手術器械であり、骨手術の際に、手動式又は動力式手術器械に取り付け、骨を切削するために用いる。

【使用方法等】

1.使用方法

- 本品は未滅菌のため使用前に滅菌すること。滅菌は【保守・点検に係る事項】の「滅菌方法」により行うこと。
- 本品を手動式又は動力式手術器械に取り付け、骨を切削する。
- 使用後は【保守・点検に係る事項】の「使用者による保守点検」のより、洗浄すること。

2.使用方法等に関連する使用上の注意

- 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。
- 滅菌前に本品に損傷、変形等の異常がないことを点検すること。
- 使用前に必ず洗浄、滅菌すること。
- 術野内でソーブレードが破損した場合は、全ての破損片を除去すること。また、使用後は直ちに点検し、破損、折損等が見つかった場合は破損片が体内に遺残していないか調べ、遺残していた場合は摘出等適切な処置を施すこと。
- ブレード使用時には、ブレードの過熱を防ぎ、骨壊死を防ぐため、生理食塩水で冷却すること。
- 骨切削中、ブレードを金属物に接触させないこと。ブレードが破損し、破片が手術部位に飛散するおそれがある。
- 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないように、直ちに洗浄液に浸漬すること。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚染物を除去し、感染防止のため洗浄・消毒すること。
- 損傷・変形等がある器械は、識別した上で再使用しないこと。
- 滅菌は、正しく整備、校正された滅菌器を使用すること。
- 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので、できるだけ、使用を避けること。使用中に付着した時には水洗いすること。強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は器械を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器械の表面が損傷するので、汚染物除去及び洗浄時に使用しないこと。

- 本品がクロイツフェルト・ヤコブ病患者への使用及びその汚染が疑われる場合は、破棄処分すること。

2.不具合・有害事象

- 重大な不具合
 - 破損
 - 変形
- 重大な有害事象
 - 血管損傷、組織損傷等
 - 一過性又は永続性の神経損傷等
 - 筋肉と繊維組織の弛緩等
 - 骨折及びインプラントの緩み
 - 破損片などの体内遺残
 - 骨壊死
 - 感染

3.高齢者への適用

高齢者は、骨が粗鬆化している場合があり、術中に過度の力を加えることにより骨折したり、インプラント埋植後、緩み等が起きる可能性があるため、慎重に使用すること。

【保管方法及び有効期間】

＜保管方法＞

水濡れ及び高温多湿を避け、室温にて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検＞

- 使用後は、分解が可能な器械は分解し、損傷がないかどうかを検査すること。
- 洗浄に用いる洗剤は適切な酵素洗浄剤を使用すること。
- 汚れた器械は5分間以上洗浄液に浸漬すること。洗浄は、柔らかいブラシを使用し、洗浄しにくい箇所に注意を払い血液や異物等を落とすこと。
- 壊れやすい部分に気を付けて、曲げたり、器械の機能を損なわないようにブラシ等で洗浄すること。
- 超音波洗浄により中性洗剤を用い10分間以上洗浄すること。また、先端鋭利部同士が接触して損傷しないようにすること。
- 器械は温かい精製水(ろ過、蒸留水、脱イオン化等)で完全に洗い流すこと。
- 最終洗浄後は、直ちに乾燥させること。

＜滅菌方法＞

本品は医療機関内において 10^{-6} 以下の無菌性保証水準が得られる条件で滅菌を行う。

・高圧蒸気滅菌の場合
 サイクル:前真空

温度	時間
121℃	20分
132℃	10分

(滅菌方法については、滅菌装置製造元の使用説明書に従うこと。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】 株式会社 フジフレックス
 電話:0743-72-0888