

一般医療機器 類別:器 58 整形用器具器械
一般的名称:脊椎手術用器械 (JMDN コード:70963001)

トライアル

【禁忌・禁止】

- 本品について、改造や加工等を行わないこと。[形状の変更や刻印をするなどの二次加工は折損の原因となるため]

【形状・構造及び原理等】

1.形状等

本品は脊椎固定術等の脊椎手術専用の手術器械である。



TELAMON-P トライアル 3°

サイズ	製品コード (JAN)	PartsNo.
8×22MM	4571201312262	JS100050822A
8×26MM	4571201312279	JS100050826A
10×22MM	4571201312286	JS100051022A
10×26MM	4571201312293	JS100051026A
12×22MM	4571201312309	JS100051222A
12×26MM	4571201312316	JS100051226A
14×22MM	4571201312323	JS100051422A
14×26MM	4571201312330	JS100051426A



TELAMON-P トライアル 8°

サイズ	製品コード (JAN)	PartsNo.
8×22MM	4571201313269	JS100160822A
8×26MM	4571201313276	JS100160826A
10×22MM	4571201313283	JS100161022A
10×26MM	4571201313290	JS100161026A
12×22MM	4571201313306	JS100161222A
12×26MM	4571201313313	JS100161226A
14×22MM	4571201313320	JS100161422A
14×26MM	4571201313337	JS100161426A

原材料:ステンレス鋼

(ステンレス鋼には、クロム及びニッケルが含まれている。)

2.原理

本品は脊椎固定術等の脊椎手術において、適切なサイズのインプラントを確認するために用いる。

*【使用目的又は効果等】

本品は脊椎固定術等の脊椎手術に用いる手術器械をいう。手動式のものに限る。本品は再使用可能である。

*【使用方法等】

1.使用方法

- 本品は未滅菌のため使用前に滅菌すること。滅菌は【保守・点検に係る事項】により行うこと。
- 使用方法
本品は脊椎固定術等の脊椎手術の際、埋植するインプラントのサイズを決めるために用いる。
(詳細は使用するシステムの手技書を参照すること。)
- 使用後は【保守・点検に係る事項】により洗浄すること。

2.使用方法に関連する使用上の注意

- 患者の体質や解剖学的構造を考慮し、適切な組み合わせを選択すること。
- 使用目的(手術・処置等の医療行為)以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時、必要以上の力を加えないこと。
- 滅菌前に、本品に損傷、変形等の異常がないことを点検すること。
- 使用前に必ず洗浄、滅菌すること。
- 併用して使用する手術器械がある場合は、事前に組み合わせ、異常なく使用できることを確認すること。
- 術者及び手術従事者は、使用前、使用中、使用後において本品の正常性を確認すること。
- 術中に異常が認められた場合は、直ちに使用を中止すること。
- 使用後は直ちに点検し、破損、折損等が見つかった場合は破片が体内に遺残していないか調べ、遺残していた場合は、提出等適切な処置を施すこと。
- 摩耗粉が生じた場合、速やかに洗浄し、除去すること。
- 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないように、直ちに洗浄液に浸漬すること。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- 併用するインプラントや器械の添付文書を必ず読んでから使用すること。
- 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚染物を除去し、感染防止のため洗浄・消毒すること。
- 損傷・変形等がある器械は、識別した上で返却すること。
- 滅菌は、正しく整備、校正された滅菌器を使用すること。
- 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので、できるだけ、使用を避けること。使用中に付着した時には水洗いすること。
- 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は器械を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器械の表面が損傷するので、汚染物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- **本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。また、本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

2.不具合・有害事象

本品の使用により起こり得る不具合・有害事象は以下のようなことがある。

- 重大な不具合
破損、変形、摩耗等の不具合が現れた場合は、使用を中止し適切な処置を行うこと。
- 重大な有害事象
以下のような有害事象が現れた場合は、症状に応じて適切な処置を行うこと。
 - 感染
 - 塞栓(脂肪、血液等)
 - 骨折
 - 過敏症

- 5) 体内遺残
- (3) その他の有害事象
- 以下のような有害事象が現れた場合は、症状に応じて適切な処置を行うこと。
- 1) 関節の亜脱臼又は脱臼
 - 2) 関節部の一過性または永続性の神経損傷
 - 3) 血管損傷

3.高齢者への適用

高齢者は、骨が粗鬆症化している場合があり、術中に過度の力を加えることにより骨折したり、インプラント埋植後、緩み等が起きる可能性があるがあるので、慎重に使用すること。

*【保管方法及び有効期間等】

保管方法:水濡れおよび高温多湿を避け、室温にて保管すること。

*【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検〉

- (1) 使用後は、分解が可能な器械は分解し、損傷がないかどうかを検査すること。
- (2) 洗浄に用いる洗剤は適切な酵素洗浄剤を使用すること。
- (3) 汚れた器械は 5 分間以上洗浄液に浸漬すること。洗浄は、柔らかいブラシを使用しスレッド部、隙間や継ぎ目などの洗浄しにくい箇所に注意を払い血液や異物等を落とすこと。
- (4) 壊れやすい部分に気を付けて、曲げたり、器械の機能を損なわないようにブラシ等で洗浄すること。
- (5) 超音波洗浄により中性洗剤を用い 10 分間以上洗浄すること。
- (6) 器械は温かい精製水(ろ過、蒸留水、脱イオン化等)で完全に洗い流すこと。全てのルーメン、内部、スライド機構、ヒンジは動かしながら洗い流すこと。
- (7) 最終洗浄後は、直ちに乾燥すること。できるだけフィルターを通した圧縮空気です内部を乾燥すること。
- (8) できるだけ、可動部に適切な水溶性潤滑剤を使用すること。

〈滅菌方法〉

本品は、医療機関内において 10^{-6} 以下の無菌性保証水準が得られる条件で滅菌を行う。

・高圧蒸気滅菌の場合

サイクル:前真空

温 度	時 間
121℃	20 分
132℃	10 分

(滅菌方法については、滅菌装置製造元の使用説明書に従うこと。)

*【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

株式会社 フジフレックス

住所: 〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1067番地25

電話:0743-72-0888