

機械器具 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
管理医療機器 特定保守管理医療機器 汎用画像診断装置ワークステーション 70030000
(汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム 70030012)


富士画像診断ワークステーション FS-V673 型

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

本装置は、コンピュータに画像表示、画像処理などのソフトウェアを実装したワークステーション装置です。

1) 本装置を用いたシステム構成図

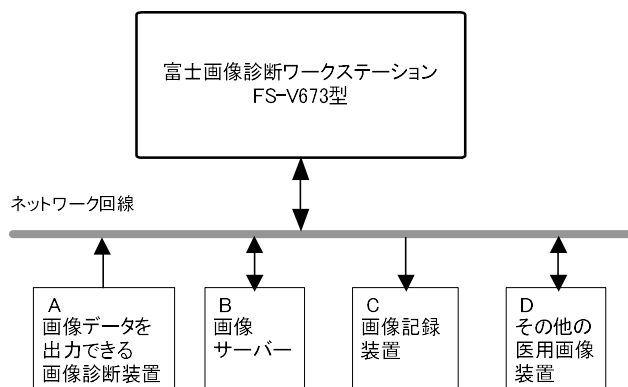

A、B、C、Dは本装置に含まれません。

2) 動作保障条件

装置を使用の際は下記の設置環境条件を守ってください。

動作時

温度：10℃～35℃

湿度：30%RH～80%RH (結露なきこと)

非動作時

温度：-10℃～50℃

湿度：20%RH～80%RH (結露なきこと)

冬季など乾燥しすぎる場合は加湿してください。

※本装置を構成するハードウェアは汎用品のため予告なく変更する場合があります。

※外観、寸法、質量、電氣的定格は使用する汎用電気機器のタイプに依存します。

〈動作原理〉

医用画像装置 (CR、DR、X線CT装置、MRI装置等) のデジタル画像を保管した画像サーバおよびその他の医用画像装置等とネットワークで接続し画像データをオンラインで受け渡しが可能です。また、オフラインでも受け渡しが可能です。オペレータは画像データを随時ディスプレイ上に表示し、必要に応じて画像処理を施すことができます。画像データをDICOM形式で扱います。さらに3次元画像処理ソフトウェアを用いることによって、必要に応じて3次元画像を再構成し、その結果を表示することができます。3次元画像は、MIP画像、MPR画像を含みます。

【使用目的又は効果】

本装置は、デジタル医療画像装置 (CR、DR、エックス線CT装置、MRI装置など) のデジタル画像を保管した画像サーバとネットワークで接続し、画像データを受信、表示し、必要に応じて画像処理を行うワークステーション装置で、これら医療画像データを有効に活用し、医師の診断を支援する目的で使用します。

【使用方法等】

〈使用方法〉

1) 電源ONおよび準備

- (1) コンピュータ本体の電源スイッチを押すと自動的に OS が起動します。
アプリケーションを起動すると、システムが起動します。
異常なく起動されたことを確認してください。
- (2) 本装置に接続された画像記録装置などの電源 ON および操作は、各装置の操作手順に従ってください。

2) 使用中の主な操作

- ・画像表示
- ・各種画像処理
- ・画像の記憶媒体への保管
- ・画像のプリント

3) 電源OFF

- (1) 取扱説明書の記載に従って終了してください。
- (2) 本装置に接続された画像記録装置などの電源 OFF および操作は、各装置の操作手順に従ってください。

装置の詳細な操作方法は、取扱説明書を参照してください。

***〈併用する医療機器〉

本プログラムは、以下の汎用画像診断装置ワークステーション用プログラムと併用することができる。

製造販売業者	販売名	承認/認証番号
富士フィルム株式会社	画像診断ワークステーション用プログラム FS-V686型	231ABBZX00028000
富士フィルム株式会社	類似画像症例検索ソフトウェア FS-CM687型	30100BZX00263000

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- 1) 液晶ディスプレイのバックライトには寿命があるため、装置を使用する前に、ディスプレイの輝度が適切であることを確認すること。ディスプレイの輝度が適切でない場合は弊社指定の業者へ連絡すること。
- 2) 同じ画像を長時間表示するような場合には、スクリーンセーバを使用すること。
同じ画像を長時間表示すると、表示を変えたときに前の画像が残像 (焼き付いたような状態) として見える場合があります。
- 3) 輝点・黒点が現れた場合は、液晶ディスプレイの特性によるものかを確認して使用すること。
液晶ディスプレイの特性上画面上に小さな輝点・黒点が現れることがあります。この輝点・黒点は画面上の常に同じ場所に現れます。

- 4) 複数ディスプレイ構成の場合は表示の色味の差異が液晶ディスプレイの特性によるものかを確認して使用すること。
液晶ディスプレイの特性上、表示の色味に個体差があるため、複数ディスプレイ構成の場合はディスプレイごとに色味が異なることがあります。
- 5) 読影には表示する画像に適した解像度、輝度、階調、カラー／モノクロのディスプレイを使用すること。
表示する画像に適さないディスプレイを使用すると読影に支障が出る場合があります。
- 6) 読影を開始する前に視野角を確認し、視野角が適切でない場合にはディスプレイの角度を調節すること。
視野角が適切でない場合には正確な読影が困難になることがあります。
- 7) 読影を開始する前に、読影に適切なサイズで画像表示するように本装置を操作すること。
適切なサイズで画像表示がされていないと、関心領域が表示範囲内に収まらない、縮小され画像が判別できない等、読影に支障が出る場合があります。
- 8) 最新情報を確認したい場合は、F5キーを押して表示を更新すること。
キャッシュの影響によって表示されている情報が最新のものに更新されていない場合があります。
- 9) 表示された画像を拡大又は縮小する場合は、アーチファクト（偽画像）の発生が無いことを確認して使用すること。
画像の拡大又は縮小は表示する画像の特性により原理的にアーチファクト（偽画像）が発生します。
- 10) 計測結果及びスケールを使用した医療行為は、使用者の責任において行うこと。
計測結果及びスケールの精度は、モダリティから送信されるピクセルサイズ情報に依存します。また、撮影方法などによって、被写体の実際の長さに対して誤差が生じる場合があります。
- 11) 計測を行う場合は、計測ポイントの指定に注意すること。
計測する際、ポイントの指定が不正確な場合は、計測結果も不正確になります。
- 12) 表示された計測結果の*マーク表示に注意すること。
計測機能では、計測値の補正、較正が行われると、*マークが表示されます。
- 13) 画素値の計測結果を利用した医療行為は、使用者の責任において行うこと。
計測する画像を生成した医用画像装置によって、計測結果に誤差が生じる場合があります。
- 14) コモンビュー機能を使って検索した検査情報は、使用者の責任において、意図した患者のものであることを確認したうえで使用すること。コモンビューの検索結果には、意図した患者と異なる患者の検査情報が含まれることがあります。また、サーバ間での患者情報の登録内容の違いなどから、同一患者の全ての検査情報を表示できないことがあります。

【使用上の注意】

（重要な基本的注意）

- 1) 本装置を患者環境で使用しないこと。
- 2) 無停電電源装置を使用している場合で万一停電が発生したときは、すみやかに装置を終了すること。
- 3) あらかじめインストールされているもの以外のソフトウェアをインストールしないこと。
- 4) あらかじめインストールされているソフトウェアをアンインストールしないこと。
- 5) OS及びインターネットエクスプローラの設定を変更しないこと。
- 6) 本装置を廃棄する場合は、個人情報を完全に消去して廃棄すること。
- * 7) 本装置は、医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに準拠した環境のネットワークで使用すること。

- * 8) ネットワークに接続した環境で使用する場合は、コンピュータウイルス及び情報の漏洩等に注意すること。
- * 9) セキュリティの確保された病院内のネットワークに接続して使用すること。

使用上の注意の詳細は、取扱説明書を参照してください。

【保管方法及び有効期間等】

〈設置環境〉

- 1) 日光や照明などの強い光が直射・反射する場所に設置しないでください。
- 2) 強い電磁界が発生する場所に設置しないでください。
- 3) 床の上などの埃が多い場所に設置しないでください。
- 4) 水などのかからない場所に設置してください。

〈耐用期間〉

耐用期間は、使用上の注意を守り、正規の保守・点検を行った場合に限り5年間です。

〔自己認証（当社データ）による〕

【保守・点検に係る事項】

- 1) 医療機器の使用・保守の管理責任は使用者側にあります。
- 2) 本装置の動作や画像に影響が出る可能性があるため、使用者による保守点検、業者による定期保守点検を必ず行ってください。
- 3) 使用者による装置の保守点検の詳細は、取扱説明書を参照してください。
- 4) 定期保守点検周期は一日の稼働時間により異なります。
- 5) 定期保守点検項目は、保守契約の内容によって異なります。本装置の保守点検の詳細は、弊社または弊社指定の業者にお尋ねください。

使用者による保守点検事項

日常点検項目	周期
①本装置が正常に立ち上がることを確認する。	毎日
②接続されている機器と正常に通信ができることを確認する。	毎日
③コンピュータ、ディスプレイの汚れ、傷を確認し、汚れがあった場合には清掃する。	毎日

業者による保守点検事項

定期保守点検項目	周期
①ディスプレイの清掃	12ヶ月
②マウス、キーボードの清掃	12ヶ月
③ファンの点検	12ヶ月
④装置内の清掃	12ヶ月
⑤ログの確認	12ヶ月
⑥診断プログラムでのハードウェアの診断	12ヶ月

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：富士フィルムメディカル株式会社
電話番号：0120-957174

販売業者：富士フィルムメディカル株式会社
電話番号：03-6419-8033

サイバーセキュリティに関する情報請求先
<<製造販売業者と同じ>>

取扱説明書を必ずご参照ください。

897NJ000153G