

**トリキズルーシュ**

**【形状・構造及び原理等】**

1) 形状・固形状

本品は研磨剤、モノカルボン酸、色素を練り混ぜた俵形状の研磨材である。

**\*\*【使用目的又は効果】**

歯科技工補綴物の研削に用いる。

歯冠用硬質レジン等、貴金属等の補綴物の艶出し研磨に用いる

**\*\*【使用方法等】**

- 1) 本品を歯科技工用ハンドピースに取り付けたブラシ又は技工用レーズに取り付けたバフホイール等に押しあて塗布する。
- 2) 本品を塗布したブラシ又はバフホイールを、補綴物の表面に軽く押しあてながら艶出し研磨をする。

**\*\*【使用上の注意】**

- 1) 本品を取り付ける歯科用ハンドピースの取扱いは添付文書及び取扱い説明書に記載されている内容を厳守し使用すること。
- 2) 本品又は切削屑が目に入らないように保護メガネ等を装着すること。
- 3) 本品を使用して研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- 4) 本品は【使用目的又は効果】の項に記載した用途以外には使用しないこと。

**\*\*【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び感染を受けないように保管すること。
- ・歯科の従事者以外触れないよう適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者： 藤原歯科貴金属株式会社  
住所： 〒543-0016 大阪府大阪市天王寺区餌差町 8-2 明星合同  
ハイツ 1F  
電話番号： 06-6761-2680  
緊急連絡先： 藤原歯科貴金属株式会社 営業部  
電話番号： 0120-44-2680  
ファックス： 06-6761-5849